

No. _____

保証書

持込修理

品名	業務用エステ機器	型番	PSM-30B-A
形名	クイーンリフト for Pro クリアプラス		
無料修理保証	対象部分	期間	
	本体のみ	お買い上げ日から 1年間	
※販売者名	店名・住所・電話		
	<div style="font-size: 48px; font-weight: bold; margin: 0;">見 本</div> <p>ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p>		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

- 所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
- 本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

- ・ 個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<https://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。
- ・ 利用目的
お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元
ヤーマン株式会社
〒135-0045
東京都江東区古石場1-4-4

固定電話など
0120-776-282 (通話料無料)
携帯電話・PHS
0570-550-637 (通話料有料)
受付 9:00~17:00(土・日・祝日・年末年始除く)



© 2019 YA-MAN LTD.
ALL RIGHTS RESERVED

無断複製および転載を禁ず

PSM30BA-1-001


PROFESSIONAL YAMAN

保管用
保証書付

取扱説明書

業務用エステ機器
クイーンリフト for Pro
クリアプラス

PSM-30B-A

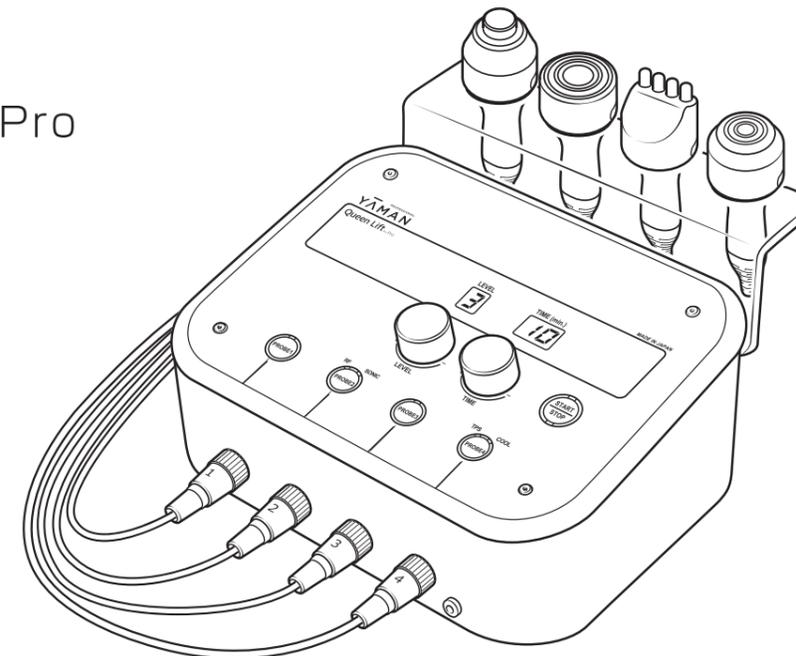

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	5
ケアの前に	7
ケアをしましょう	10
ケアが終わったら	12
こんなときには	13
アフターサービス	15
●製品仕様	15
●保証について	18
保証書	19

このたびは、ヤーマンプロフェッショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・故障状態のまま使用されると、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区分しています。

●注意区分について

	危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
	警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
	注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について(次は図記号の例です)

	してはいけないことを示しています。
	しなければならないことを示しています。
	注意しなければならないことを示しています。

●一般的な注意事項

警告

<p> 禁止</p> <p>子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。 事故・けがの原因となります。</p>	<p> 必ず守る</p> <p>異臭・異常発熱したときは使用を中止する。 破損・発火の原因となります。</p>
<p> 禁止</p> <p>引火性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。 火災・感電・けがの原因となります。</p>	<p> 禁止</p> <p>本体の周辺に可燃物(雑誌、スプレー等)を置かない。 爆発・火災の原因となります。</p>
<p> 用途以外禁止</p> <p>取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。 けが・故障の原因となります。</p>	<p> 分解禁止</p> <p>分解や修理・改造はしない。 火災・感電・けがの原因となります。 修理はヤーマンコールセンター(P.15)にご相談ください。</p>
<p> 水かけ禁止</p> <p>浴室内、水場では使用しない。本体やプローブ、ACアダプターを水につけたり、水洗いしない。 感電・ショート・発火の原因となります。</p>	<p> 必ず守る</p> <p>コード類は足元の邪魔にならないようにする。 断線の原因となります。</p>
<p> 必ず守る</p> <p>使用しないとき・お手入れするときは必ず電源をオフにする。 感電・ショート・発火の原因となります。</p>	<p> 発火注意</p> <p>火のそばや炎天下、浴室など高温多湿の場所に、放置しない。また、熱器具に近づけない。 発熱・発火・破裂の原因となります。</p>

注意

<p> 禁止</p> <p>通電したまま放置しない。 事故・トラブルの原因となります。</p>
--

●電源に関する注意事項

警告

<p> 傷んだコードプラグ使用禁止</p> <p>ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因となります。 修理はヤーマンコールセンター(P.15)にご相談ください。</p>	<p> タコ足配線禁止</p> <p>本製品には必ず専用のACアダプターを使用する。またACアダプターは、壁のコンセントに直接差し込み、タコ足配線にしない。 感電・ショート・発火の原因となります。</p>
--	---

安全上のご注意

警告

<p> 無理な扱い禁止</p> <p>ACアダプターを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしない。 重いものを乗せたり、はさみ込んだりすると、ACアダプターが破損し、火災・感電の原因となります。</p>	<p> 必ず守る</p> <p>電源プラグとコンセントにホコリが付着していないか点検する。 感電・ショート・発火の原因となります。</p>
<p> プラグを抜く</p> <p>本体やコンセントからACアダプターを抜くときは、必ず先端のプラグを持って引き抜く(金属部に触れない)。また、ぬれた手で抜き差しはしない。 感電・ショート・発火の原因となります。</p>	<p> 必ず守る</p> <p>交流100~240Vで使用する。(無料修理は国内使用のみ)ACアダプターは根元まで確実に差し込む。 火災・感電・事故の原因となります。</p>
<p> ACアダプターを抜く</p> <p>万一、異常が発生したら、ACアダプターをすぐに抜く。けむり・異音・おいがするなど、異常状態のまま使用しないでください。</p>	<p> ACアダプターを抜く</p> <p>ガス漏れに気付いたときは、ただちに使用を中止して排気をしてから電源をオフにする。 火災の原因となります。</p>
<p> ACアダプターを抜く</p> <p>お手入れするときは必ず電源をオフにし、使用しないときはACアダプターをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差しはしない。 感電・ショート・発火の原因となります。</p>	<p> ACアダプターを抜く</p> <p>地震・雷または停電の時は、ただちに使用を中止して電源をオフにし、ACアダプターをコンセントから抜く。 事故の原因となります。</p>

●使いかたに関する注意事項

危険

<p> 禁止</p> <p>次に該当する人には使用しない。 医用電子機器の誤動作を招く原因となります。 ◆医用電子機器を使用している人 ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器 ・人工心臓など生命維持用医用電子機器 ・心電計などの装着型医用電子機器</p>
--

警告

<p> 禁止</p> <p>次のような人には使用しない。 事故・トラブルの原因となります。 ・医師の治療を受けている人 ・成長過程の人 ・急性疾患 ・結核性疾患 ・発熱している人 ・高血圧 ・伝染病疾患 ・悪性腫瘍 ・血液疾患 ・内臓疾患 ・皮膚病 ・アレルギー体質 ・貧血症 ・感染症 ・血友病疾患 ・心臓疾患 ・顔面黒皮症 ・アトピー性皮膚炎 ・皮膚トラブルがある人 ・疲労が激しい人 ・知覚障害の人 ・マヒの人 ・安静を必要としている人 ・機器の使用で疼痛が激しくなる人 ・引きついで意識を失う発作性の人 ・過度に毛細血管がもろい人 ・美容整形手術後3ヶ月以内の人 ・敏感肌またはお肌の弱い人 ・体調がすぐれない人 ・酒気帯びの人 ・強度近視の人(-6D以上) ・目や顔の手術を受けた人 ・目や顔に疾患がある人および治療中の人 ・妊娠中、生理中、授乳中 ・眠気をさそう薬を服用中の人 ・物理的刺激などによる病的なシミのある人 ・ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人</p>	<p> 禁止</p> <p>指定の部位以外や次のような部位には使用しない。 事故・トラブルの原因となります。 ・切り傷 ・手術(整形手術)をした部位 ・口内や陰部、粘膜など ・過度の日焼けでお肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人 ・にきび ・皮膚が化膿し炎症を起こしている部位 ・カユミやほてりのある部位 ・膨らんだホクロ ・ウイルス性のイボ ・眼球 ・頭部および頭髪 ・痛覚、知覚障害を起こしている部位 ・まぶた、目のまわり、のどぼとけ(クールモード使用時以外) ※LEDの光はまぶた、目のまわりに照射できます。その際、目を閉じ、ヘッドをお肌から5cm以上離してください。 LED光は直接のぞき込まないでください。 ご自身で判断ができない場合は、使用前に医師にご相談ください。</p>
--	--

<p> 禁止</p> <p>施術中に本体を移動させない。 けが・故障の原因となります。</p>	<p> 禁止</p> <p>他の電気製品(美容機器等)と併用しない。また、接触させない。 誤動作・故障・けがの原因となります。</p>
<p> 禁止</p> <p>製品(本体・プローブ・ACアダプター)の上に水などの入った容器を置かない。 感電・ショート・発火の原因となります。</p>	<p> 禁止</p> <p>水の中に落とさない。水の中につけない。浴室や湿気の多い所で使用しない。保管しない。 感電・ショート・発火の原因となります。</p>

警告

- 禁止** ソニックピールモード、サーモソニックモード、RFモード使用時は同じ箇所にあて続けず。必ずお肌の上を動かしながら使用する。ヘッド面全体があたらない部分に使用しない。
やけど・肌トラブルの原因となります。
- 禁止** エステティシャン以外の人は操作しない。
事故・故障の原因となります。
- 禁止** オーバーケアはしない。
事故・肌トラブルの原因となります。
- 禁止** 子供や自分で意思表示ができない人に使わせない。また、身体の不自由な人だけの使用は避ける。
事故・けがの原因となります。
- 禁止** 施術中はお客様から離れない。
事故の原因となります。
- 必ず守る** 使用する前は必ず正常に作動することを確認したうえで使用する。
事故・けがの原因となります。


注意

- 禁止** LEDの光を直接のぞき込まない。LED光で目のまわり、まぶたへのケアをするときは、目を閉じ、ヘッドをお肌から5cm以上離して使用する。
目やお肌を傷める原因となります。
- 禁止** クールモードを連続して使用しない。
連続使用すると、プローブが熱をもちます。再度使用するときは1時間以上間をあけてから使用してください。
- 禁止** 使用禁止部位(P.2)には使用しない。
歯を治療中の人、歯に詰め物がある人は、TPS導入モード、美創筋EMSモードの刺激により、歯に違和感を感じることがあります。レベルを下げ、使用部位を調節してお使いください。
- 禁止** 以下の項目は行わない。
事故・けが・故障の原因となります。
・お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
・落としたり、ぶつけたりして損傷した場合は使用しない。
・過剰な連続使用をしない。
- 禁止** 本体をアルカリ洗剤・アルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かない。
本体の表面に損傷を与える原因となります。
- 禁止** 不安定な場所に置かない。本体を落としたり、ぶつけたりしない。
故障の原因となります。また、足の上などに落とすとけがの原因となります。
- 禁止** ひび割れや傷の入ったプローブを使用しない。
お肌を傷つける原因となります。
- 禁止** ヘッドを金属にあてない。
故障・けがの原因となります。
- 禁止** 本体・付属品等に強い衝撃を与えたり、尖ったものなどで突いたりしない。
故障の原因となります。
- 禁止** ケア中は、プローブを放置しない。
感電・やけど・肌トラブルの原因となります。
- 禁止** 本体・付属品等の上に乗らない。
けが・故障の原因となります。
- 禁止** ペットには使用しない。
けがの原因となります。
- 禁止** 手にジェルや水が付いたまま使用しない。
事故の原因となります。
- 禁止** 化粧品(使用に適さないものを除く)、水以外使用しない。
肌トラブル・故障の原因となります。
〈使用に適さない化粧品〉・オイル・スクラブ系・刺激の強い化粧水


注意

- 必ず守る** 使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外す。
やけど・肌トラブルの原因となります。
- 必ず守る** 長期間使用しなかった場合、再使用する前には正常に作動するか点検する。
事故・故障の原因となります。
- 必ず守る** 使用中に身体に違和感がある場合は、使用を中止する。使用中、使用後にお肌の異常がみられるときは使用を中止してください。
- 必ず守る** 製品のお肌に触れる部分は、毎回お手入れし、常に清潔な状態で使用する。
肌トラブルの原因となります。
- 必ず守る** 必ずレベル1から使用し、お客様の様子を伺いながら使用する。
事故・けがの原因となります。
- 必ず守る** ヘッドと肌との間に、常にジェルや水があるように、途中でジェルや水を補充する。
肌トラブルの原因となります。
- 必ず守る** 力を入れて肌にこすりつけない。
肌トラブルの原因となります。
- 必ず守る** 肌表面にピリビリした痛みを感じた場合は、部位をずらして使用する。またはジェルや水を補充する。
肌トラブルの原因となります。


●本体

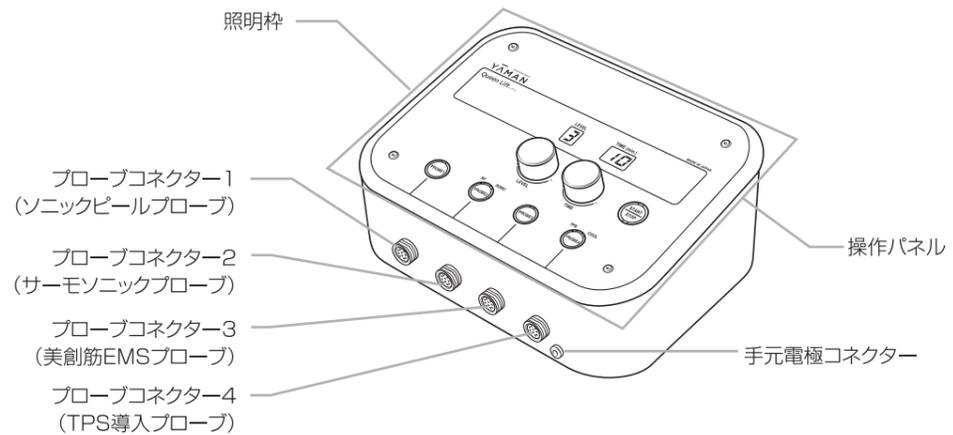


<背面>

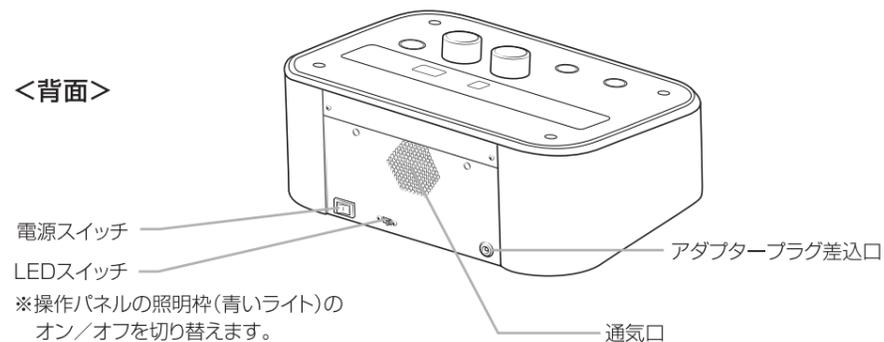


<底面>

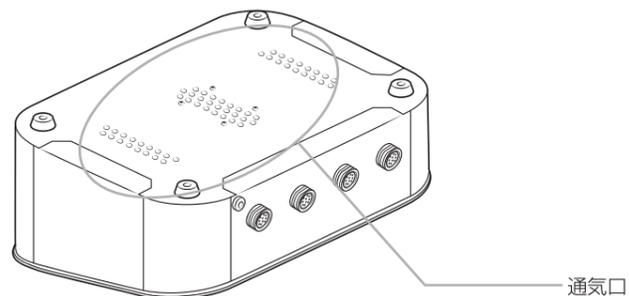


[ソニックピールプローブ]

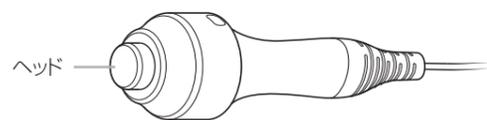



[サーモソニックプローブ]

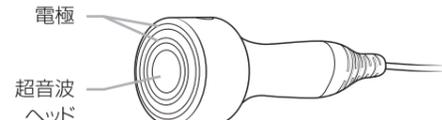


[美創筋EMSプローブ]

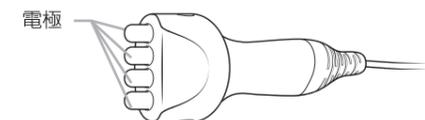

[TPS導入プローブ]

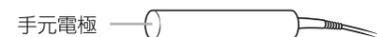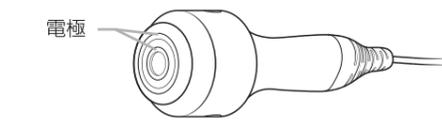


●付属品

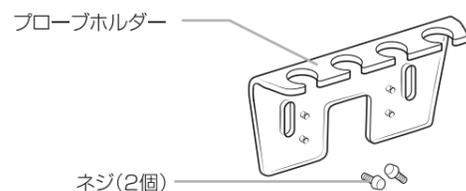

・ACアダプター.....1個
※ACアダプターは本製品専用です。

※本体および付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

操作パネル

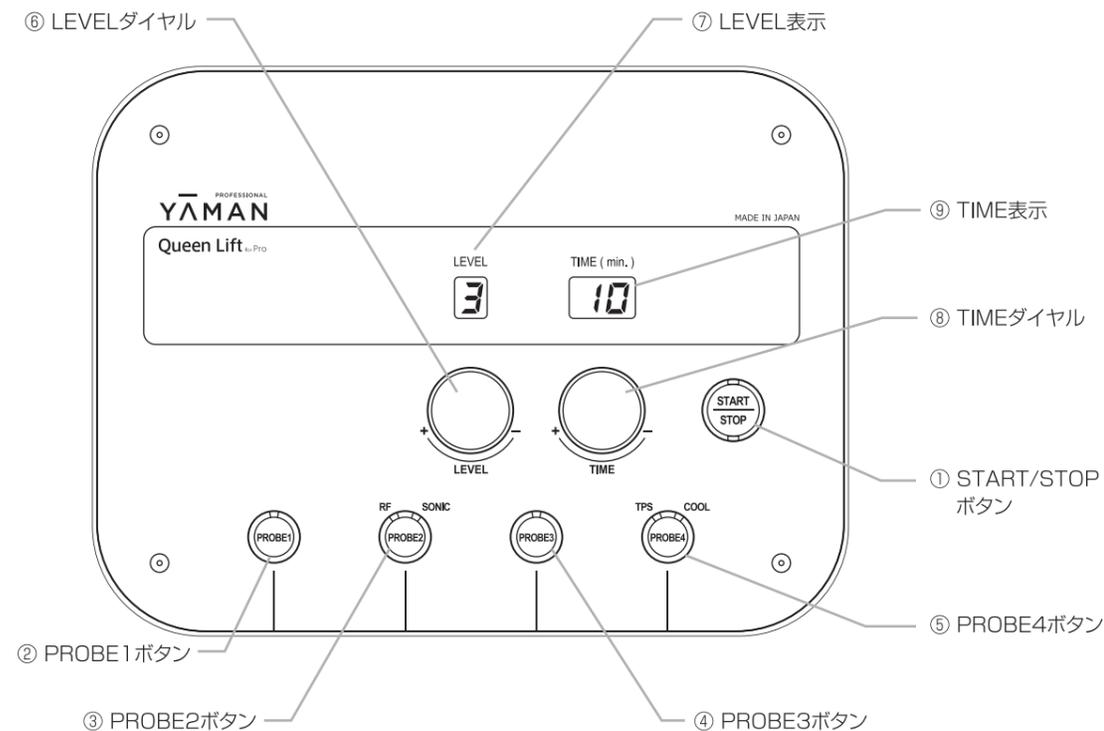

① START/STOPボタン

START : PROBEボタンで機能を選択してからボタンを押すと、ケアを開始します。
STOP : ケアを途中で止めたいときにボタンを押すと、動作が停止します。

② PROBE1ボタン

ソニックピールプローブ*を使用するときに、ボタンを押します。

③ PROBE2ボタン

サーモソニックプローブ*を使用するときに、ボタンを押してモードを選択します。

④ PROBE3ボタン

美創筋EMSプローブ*を使用するときに、ボタンを押します。

⑤ PROBE4ボタン

TPS導入プローブ*を使用するときに、ボタンを押してモードを選択します。

※プローブやモードの詳細については、「モードについて」(P.8)を参照してください。

⑥ LEVELダイヤル

ダイヤルを左右へ回して、ケアレベルを選択します。
レベル: 1~9
ケア中にレベルを変更することもできます。

⑦ LEVEL表示

⑥ LEVELダイヤルで選択したレベルが表示されます。

🔦ポイント

クールモードでは、レベルを選択できません。

⑧ TIMEダイヤル

ダイヤルを左右へ回して、ケア時間を選択します。
時間: 1~20分

⑨ TIME表示

⑧ TIMEダイヤルで選択した時間が表示されます。
ケア中は、残り時間が表示されます。

🔦ポイント


・ケア中に時間を変更する場合は、START/STOPボタンで一時停止させてからTIMEダイヤルを回してください。
・クールモードは、3分固定です。それ以外の時間に設定できません。

本体の準備

ケアを始める前に、本体の準備をします。

1 プローブホルダーを取り付ける。

- ① 本体の背面にプローブホルダーをあて、ネジ穴を合わせる。
 - ・ 高さは2段階に調整できます。使いやすい高さに合わせてください。
- ② ネジ2個で固定する。
 - ・ ネジを右方向(時計回り)へ止まるまで回してください。

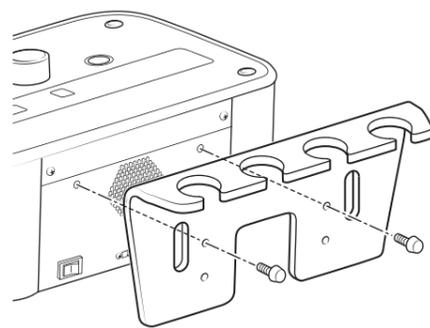

2 プローブを接続する。


- ① 各プローブのプラグをプローブコネクタに接続する。

コネクタ	1	2	3	4
プローブ	ソニック ピール	サーモ ソニック	美創筋 EMS	TPS 導入

- ② 固定用リングを右方向(時計回り)へ止まるまで回す。
- ③ プローブのヘッドをプローブホルダーに掛ける。


注意

- ※ プローブは、本体のPROBEボタンと連動しています。必ず、指定の位置に接続してください。
- ※ プラグの向きに注意して、プラグの切り欠きとコネクタの突起を合わせて接続してください。

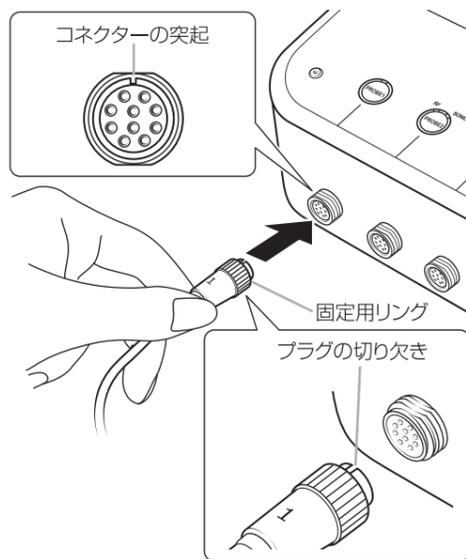


3 手元電極を接続する。

- ・ 手元電極のプラグを手元電極コネクタに接続します。
- ※ ソニックピールモード、TPS導入モードで使用します。

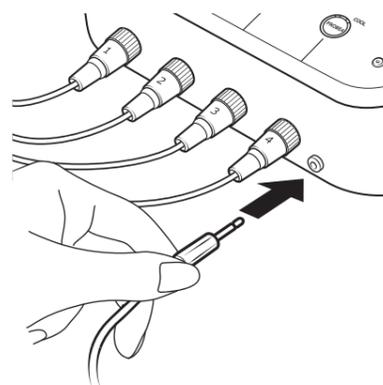

4 ACアダプターを接続する。

- ① アダプタープラグを本体背面のアダプタープラグ差込口に差し込む。
- ② ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

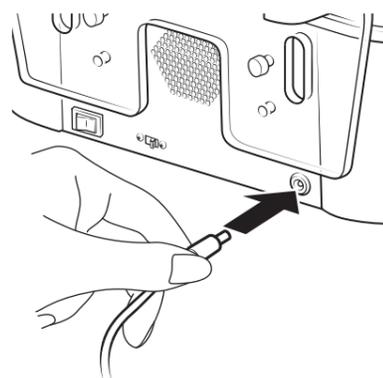

モードについて

本製品は、4つのプローブによる複数のフェイシャルケアができます。お客様のお肌の状態や目的に合わせて各モードを組み合わせ、ケアしてください。

注意

※ プローブを2本以上同時に使用することはできません。


プローブ	モード	操作ボタン/ ランプ表示 (□:消灯 ■:点灯)	目的	レベル	時間設定
ソニックピール	ソニック ピール	PROBE1	超音波とイオンクレンジングで毛穴の汚れを取り除きます。	1~3	1~20分
サーモソニック	サーモ ソニック	RF SONIC PROBE2	3MHzのラジオ波で深層温熱ケア。さらに、超音波とのダブルの力でお肌にハリを与え、肌基盤(※角質層)を引き締めます。	1~9	1~20分
	RF	RF SONIC PROBE2 (2回押し)			
	SONIC	RF SONIC PROBE2 (3回押し)			
美創筋EMS	美創筋 EMS	PROBE3	特殊な4電極によるドレナージュタッピングシステムにより、お肌の土台をケアします。	1~9	1~20分
TPS導入	TPS導入	TPS COOL PROBE4	化粧品の導入をサポートします*。 ※角質層まで	1~9	1~20分
	クール	TPS COOL PROBE4 (2回押し)	冷やすことでお肌を引きしめます。	-	3分 (固定)

モード選択

サーモニックプローブとTPS導入プローブは、複数のモードを選択することができます。各モードの詳細については、「モードについて」(P.8)を参照してください。


●サーモニックプローブ

電源がオンの状態でPROBE2ボタンを押すたびに、下図のようにモードが切り替わります。

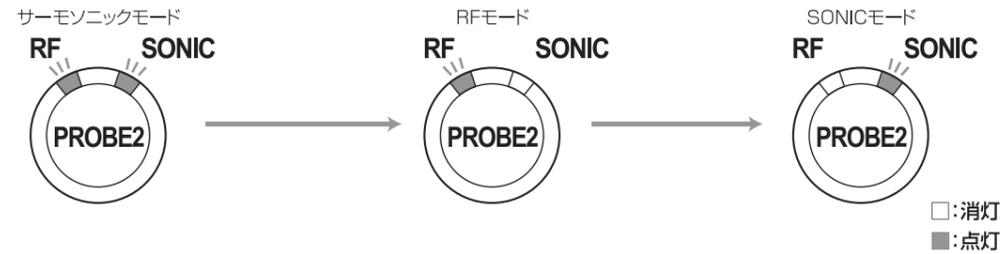

●TPS導入プローブ

電源がオンの状態でPROBE4ボタンを押すたびに、下図のようにモードが切り替わります。

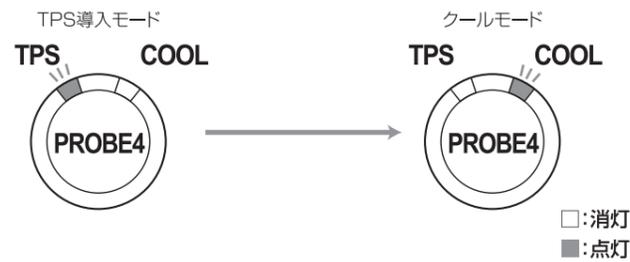

ケアの前に

使用上のご注意


- 必ずレベル1から使用し、お客様の様子を伺いながら使用してください。
- ソニックピールモード、サーモニックモード、RFモード使用時は、必ずお肌の上を動かしながら使用してください。同じ箇所にあて続けるとやけど、肌トラブルの原因となります。
- 使用時は美容液、ジェルなどをお肌に塗布してください。(クールモード以外)
- 使用時の化粧品の種類や個人差、お肌の状態によって、刺激の感じかたが変わります。
- まぶた、目のまわり、のどぼとけは使用しないでください(クールモード使用時以外)。
※LEDの光はまぶた、目のまわりに照射できます。その際、目を閉じ、ヘッドをお肌から5cm以上離してください。
- TPS導入モードおよびクールモードのLED光を直接のぞき込まないでください。
- ソニックピールモード、TPS導入モードを使用する場合は、お客様に必ず手元電極を持たせてください。
- 推奨環境温度15℃~30℃

使いかた

- 1 電源をオンにする。
 - ・本体背面の電源スイッチをオン(●)側へ倒します。
 - ・電源がオンになると、操作パネルの照明枠が青く点灯します。

ポイント

- ・本体背面のLEDスイッチで、操作パネルの照明のオン/オフを切り替えることができます。

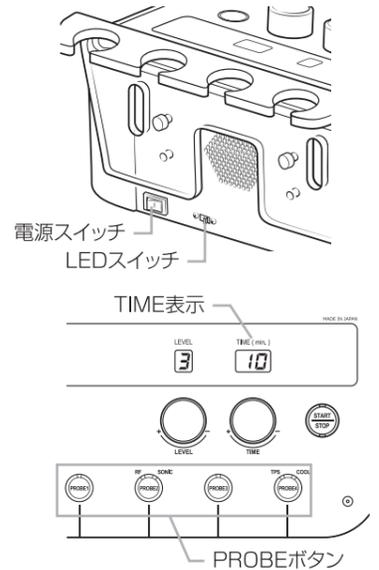


- 2 モードを選択する。
 - ・使用するプローブに応じて、PROBEボタンを押してモードを選択します。
 - ・プローブごとの推奨使用時間がTIME表示に表示されます。

●使用時間を変更する場合

- ・TIMEダイヤルを左右に回して、使用時間を設定します。
時間: 1~20分
- ・設定された時間は、TIME表示に表示されます。

ポイント

- ・クールモードは、3分固定です。それ以外の時間に設定できません。

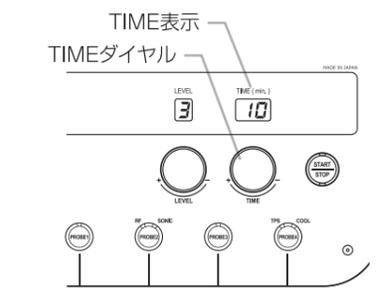


- 3 レベルを設定する。
 - ・LEVELダイヤルを左右に回して、レベルを設定します。
レベル: 1~9
 - ・設定されたレベルは、LEVEL表示に表示されます。

ポイント

- ・クールモードのレベルは選択できません。

注意

※必ずレベル1から使用し、お客様の様子を伺いながら使用してください。

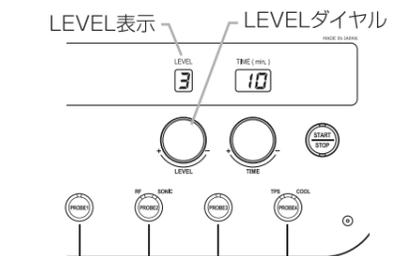

- 4 ソニックピールモード、TPS導入モードを使用する場合は、お客様に手元電極を持たせる。

注意

※ソニックピールモード中、TPS導入モード中は手元電極を持たせ続けてください。


ケアをしましょう

5 選択したモードに応じたプローブを持ち、START/STOPボタンを押す。

- ・ START/STOPボタンのLEDが青点灯し、選択したモードが開始されます。
- ・ ケア中は操作パネルの照明枠が、青点灯と消灯をゆっくり繰り返します。

ポイント

- ・ 本体背面のLEDスイッチで、操作パネルの照明のオン/オフを切り替えることができます。

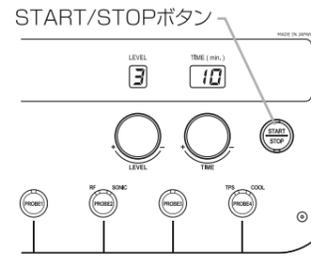

6 お客様のケアをおこなう。

- ・ 同梱されている「トリートメントブック」を参照して、ヘッドをお肌にあてて動かします。
- ・ 設定した時間が経過すると、ケアが終了します。

ポイント

- ・ 使用中は必ず、ヘッドをしっかりお肌にあててください。
- ・ ケア中にモードを変更したい場合は、START/STOPボタンを押して一度停止してから、モードを選択してください。
- ・ 30秒ごとに「ピピッ」という音が鳴ります。ケア時間の目安にしてください。



注意

- ※クールモードを使用した後はプローブが熱を持つため、同じプローブを使用したケアは1時間以上の時間をあけてから行ってください。
- ※そのほかのモードも最大設定時間(20分)で使用した場合は、同じプローブを使用したケアは15分以上の時間をあけてください。

7 電源をオフにする。

- ・ 本体背面の電源スイッチをオフ側へ倒します。


注意

- ※ケア時間が残っている場合は、START/STOPボタンを押して一度停止してから電源をオフにしてください。
- ※使用後は毎回本体、プローブのお手入れをしてください(P. 12参照)。

ケアのしかた

詳しい使いかたは、トリートメントブックをご覧ください。

●おすすめのケアコース

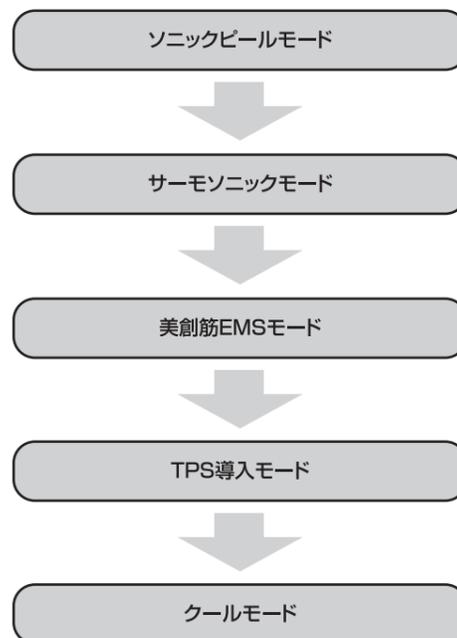

お手入れのしかた

本製品を清潔に保つために、使用後は毎回お手入れをしてください。



- お手入れするときはACアダプターを壁面コンセントから抜く。
- 本体内部に水が入らないようにお手入れする。
感電・ショート・発火の原因となります。

1 電源をオフにして、壁面コンセントからACアダプターを外す。

2 プローブのヘッド・電極部・手元電極の汚れは、水を含ませてかたく絞ったやわらかい布で拭き取る。

注意

- ※アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- ※化粧水や美容液等が付着した状態で放置しないでください。
- ※水洗いしないでください。

3 本体・プローブの汚れは、乾いた布で拭き取る。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体、プローブのお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P. 13~14)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、購入明細をご用意のうえヤーマンコールセンター(P. 15)までご相談ください。

困ったときは

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	電源スイッチを倒していない	電源スイッチをオン(●)側に倒して電源をオンにしてください
	ACアダプターが壁面コンセントに差し込まれていない(タコ足配線など)	ACアダプターを壁面コンセントに差し込んでください
	アダプタープラグが本体に差し込まれていない	アダプタープラグを本体に差し込んでください
モードが開始されない	プローブが誤った位置に接続されている	プローブを正しく接続してください(P.7)
	プローブがしっかりと接続されていない	
	START/STOPボタンを押していない	START/STOPボタンを押してモードをスタートさせてください
本体が熱い	連続使用した	電源をオフにして1時間以上本体を休ませてください
超音波が痛い (ソニックピールモード使用時)	お肌が乾燥している	お肌を化粧水や美容液等で湿らせてからご使用ください
	強くこすりつけている	軽くすべらせてください
超音波が弱い・感じない	ヘッドがお肌に密着していない	ヘッド面全体をお肌にあててください
ピリピリする・痛い	設定レベルが高い	LEVELダイヤルでレベルを下げてください
	ヘッド全体がお肌に当たっていない	ヘッド全体をお肌にあててください
EMSが弱い・感じない	設定レベルが低い	LEVELダイヤルでレベルを上げてください
	お肌に水分が足りないまたは乾燥している	お肌を化粧水や美容液等で湿らせてからご使用ください
	筋肉に沿ってあてていない	ヘッドを筋肉に沿ってあててください
熱い(クールモード使用時以外)	ヘッドをお肌に長時間あて続けている	クールモード使用時以外は必ず動かしながら使用してください
	動かすスピードが遅い	少し速く動かしてください

こんなときは

こんなときは

こんな症状	考えられる原因	処置方法
RFの熱さを感じない	START/STOPボタンを押していない	START/STOPボタンを押してモードをスタートさせてください
	サーモニックモードまたはRFモードになっていない	PROBE2ボタンを押してサーモニックモードまたはRFモードを選択してください
	お肌に水分が足りないまたは乾燥している	お肌を化粧水や美容液等で湿らせてからご使用ください
	動かすスピードが速い	少しゆっくり動かしてください
クールモードで冷えない	クールモードを連続使用した	電源をオフにして1時間以上プローブを休ませてください
	推奨環境温度以外で使用している	15℃~30℃の環境で使用してください
クールモードのレベルが設定できない	クールモードではレベル設定ができません	
クールモードの時間が設定できない	クールモードの作動時間は3分以外設定できません	
イオンが出ない (感じない)	手元電極に触れていない	手元電極をしっかり握ってください
	使用したい箇所を濡らしていない	お肌を化粧水や美容液等で湿らせてからご使用ください
	感じ方には個人差があります	

よくあるご質問

Q	A
化粧水や美容液などは1回どれくらい使用すればよいですか?	本製品の特長として、化粧水や美容液等を多く使用したほうがより温熱の体感を得ることができます。目安として、ナノリフトセラム(別売品)を使用する場合は、スタート時に1プッシュを顔全体に塗ってください。化粧水や美容液等が少ないと感じたら、補いながらケアすることをおすすめします。
サーモニックモード、RFモード使用後にお肌がほてります	RFの温めによるものです。気になる場合はクールモード、保冷剤を使用するなどしてお肌を冷やしてください。
サーモニックモード・RFモード使用時にRFの温まりを感じません	ヘッドをゆっくり動かしたり、押し付け具合を強くしてみてください。また、お肌の水分量が足りない可能性があります。化粧水や美容液等で補ってください。
顔や手にピリピリ感があります	TPS導入モード、美創筋EMSモードによる電気刺激です。LEVELダイヤルでレベル調節が可能です。心地よいと感じる強さで使用してください。必ずレベル1から使用し、お客様の様子を伺いながら使用してください。
歯に違和感を感じます	歯を治療中の人、歯に詰め物がある人は、TPS導入モード、美創筋EMSモードの刺激により、歯に違和感を感じる場合があります。レベルを下げ、使用部位を調節してお使いください。
ソニックピールモード使用後にお肌が赤くなります	ヘッドを強くこするとお肌を傷める原因となります。ヘッドはお肌の上を軽く滑らせるように動かしてください。また、ヘッドとお肌の間には、常に化粧水や美容液があるよう補充しながらお使いください。

●廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

●お問い合わせ先

本製品に関するご不明な点は、下記お客様窓口までお問い合わせください。

ヤーマンコールセンター

固定電話など
☎ **0120-776-282**(通話料無料)

受付 9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始除く)

携帯電話・PHS
☎ **0570-550-637**(通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。

※月曜日はお電話が混みあいます。

●製品仕様

電 源	DC12V 3.0A																									
消 費 電 力	約21W																									
外 形 寸 法	本体のみ:約W313×H132xD244(mm) プローブホルダー取付時:約W313×H170xD299(mm)																									
製 品 質 量	約3.2kg(本体のみ)																									
材 質	本体:アクリル、PET、鉄 ソニックピールプローブ:PET、ステンレス サーモソニックプローブ:PC、ステンレス TPS導入プローブ:PET、銅(クロムメッキ) 美創筋EMSプローブ:PET、ステンレス 手元電極:ステンレス																									
製 造 国	日本																									
セ ッ ト 内 容	<table border="0"> <tr> <td>本体.....</td> <td>1台</td> <td>プローブホルダー.....</td> <td>1個</td> </tr> <tr> <td>ソニックピールプローブ.....</td> <td>1本</td> <td>ネジ(プローブホルダー用).....</td> <td>2個</td> </tr> <tr> <td>サーモソニックプローブ.....</td> <td>1本</td> <td>ACアダプター.....</td> <td>1個</td> </tr> <tr> <td>TPS導入プローブ.....</td> <td>1本</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>美創筋EMSプローブ.....</td> <td>1本</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>手元電極.....</td> <td>1本</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		本体.....	1台	プローブホルダー.....	1個	ソニックピールプローブ.....	1本	ネジ(プローブホルダー用).....	2個	サーモソニックプローブ.....	1本	ACアダプター.....	1個	TPS導入プローブ.....	1本			美創筋EMSプローブ.....	1本			手元電極.....	1本		
本体.....	1台	プローブホルダー.....	1個																							
ソニックピールプローブ.....	1本	ネジ(プローブホルダー用).....	2個																							
サーモソニックプローブ.....	1本	ACアダプター.....	1個																							
TPS導入プローブ.....	1本																									
美創筋EMSプローブ.....	1本																									
手元電極.....	1本																									

●保証について

- ・ 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします（消耗品、付属品は除く）。
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- ・ 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・ 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・ 万一、故障が生じた場合は、販売店またはヤーマンコールセンター(P.15)にご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
3. ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、ヤーマンコールセンターにご相談ください。
5. 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の移動・転倒・落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ) 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
 - (ホ) 消耗品、付属品などの部品交換の場合。
 - (ヘ) 車輻・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
 - (ト) お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
 - (チ) 保証書のご提示がない場合。
 - (リ) 保証書のお買い上げ年月日・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。