

No. _____

保証書

持込修理

品名	業務用エステ機器	型番	PSM-90
形名	キャビスパ for Pro プレミア		
無料修理保証	対象部分: 本体のみ	期間	ご購入日から1年間
※販売者名	店名・住所・電話		
	<h1>見本</h1> <p>ご購入日のわかる明細を貼付 または本保証書とあわせて 保管してください。</p>		

販売店様へのお願い 必ず※印欄をご記入・ご捺印の上お客様へお渡ください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。
上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
●所定記入欄が空欄のままだったりお買い上げ日がわかるシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。
●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、本製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
- ご購入品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、下記お問い合わせ先にご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤りや不当な修理・改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の転倒・落下などによる故障および損傷。
 - 火災・地震・水害・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
- 接続する他の機器の異常により生ずる故障及び損傷。
- 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合。
- 車輛・船舶等に搭載された場合に生じる故障および損傷。
- お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障および損傷。
- 保証書のご提示がない場合。
- 保証書のお買い上げ年月日・お客様名・販売店名欄の記入または押印がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。

※本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものではありません。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。
※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

- 個人情報の取扱いについて
個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<http://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。
- 利用目的
お客様の個人情報をご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。
また、お問い合わせへの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。
これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元

ヤーマン株式会社

〒135-0045

東京都江東区古石場1-4-4

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土日祝日・年末年始 除く)

固定電話など

☎ 0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

☎ 0570-550-637 (通話料有料)


www.ya-man.com/biz/professional/

PSM90-1-001


PROFESSIONAL
YAMAN保管用
保証書付

取扱説明書

業務用エステ機器

キャビスパ for Pro プレミア

PSM-90

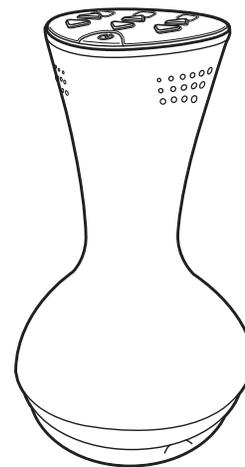

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	8
ご使用の前に	9
使いかた	11
使い終わったら	17
こんなときには	19
アフターサービス	21
●製品仕様	21
●保証について	22
保証書	23

このたびは、ヤーマンプロフェッショナル製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。
- 本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ・ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ・定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- ・異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ・ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- ・注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区別しています。

●注意区分について

 **危険** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容をです。

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容です。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

●図記号について(次は図記号の例です。)

 してはいけないことを示しています。

 しなければならないことを示しています。

 注意しなければならないことを示しています。

危険

次に該当する人は使用しない。

医用電子機器の誤動作を招く原因となります。

- 医用電子機器を使用している人
 - ・ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
 - ・人工心肺など生命維持用医用電子機器
 - ・心電計などの装着型医用電子機器

お手入れするときは、電源プラグを抜いてから行ってください。

感電の原因になることがあります。



禁止

警告

次のような人は使用しない。
事故やトラブルの原因になります。

- 医師の治療を受けている人 ●成長過程の人 ●急性疾患
- 結核性疾患 ●発熱している人 ●高血圧 ●伝染病疾患
- 悪性腫瘍 ●アレルギー体質 ●血液疾患 ●内臓疾患 ●皮膚病
- アトピー性皮膚炎 ●敏感肌または肌の弱い人 ●疲労が激しい人
- 皮膚トラブルがある人 ●体調がすぐれない人 ●酒気帯びの人
- 眠気をさそう薬を服用中の人 ●妊娠中、生理中、授乳中
- 物理的刺激などによる病的なシミのある人
- ステロイド系ホルモン剤の長期使用や、肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- 子宮内膜症や子宮筋腫など子宮に疾患のある人
- 骨粗鬆(しょう)症の人 ●脊椎(せきつい)を骨折している人
- 捻挫(ねんざ)、肉離れなど急性疼痛(とうつう)性疾患の人
- 変形性股関節症など股関節の悪い人
- 過度の日焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている人



禁止

指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
事故やトラブルの原因になります。

- 切り傷 ●整形手術をした部位 ●口内や陰部、粘膜など
- にきび ●皮膚が化膿し炎症を起こしている部位
- カユミやほてりのある部位 ●膨らんだホクロ ●ウイルス性のイボ
- 首、のどぼとけ ●頭部、顔 ●心臓の真上(みぞおち周り)
- 骨のすぐ上の皮膚の薄い部分(肘・鎖骨・額など)
- 指や手首など細い部分

ご自身で判断ができない場合は使用前に医師にご相談ください。



禁止

過度の空腹、満腹時に使用しない。
胃腸内の水分に超音波が反応し、気分が悪くなる場合があります。



禁止

頭部、顔、首には絶対に使用しない。
ケガの原因となります。



禁止

本来の目的以外に使用しない。
ケガをしたり、本製品が故障する原因となります。



必ず守る

取扱説明書は、大切に保管する。

警告



必ず守る

使用前に必ず本体が正常に作動することを確認した上で使用する。
事故やケガの原因となります。



禁止

使用前にヘッド面の割れ、変形、破損がないか確認し、破損・故障した場合は、使用しない。
お肌の傷などのトラブルや、症状悪化の原因となります。



必ず守る

電源プラグとコンセントを定期点検する。
火災・感電の原因となります。



禁止

他の機器の部品を流用しない。
事故・ケガ・故障の原因となります。



分解禁止

分解や修理・改造はしない。
火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。



禁止

他の電気製品(美容機器等)と併用しない。
誤作動のおそれがあります。



禁止

電子レンジや高圧容器に入れない。



禁止

電源をオンにした状態で床や家具の上などに放置しない。また、使用後は必ず電源をオフにする。
家具などの破損やケガの原因となります。



禁止

年少者に操作させない。
事故・ケガの原因となります。



禁止

機器で遊ばせない。
事故・ケガの原因となります。



禁止

揮発性のもの(アルコール・シンナー・ベンジン・除光液・スプレーなど)の近くで使用しない。
火災・感電・ケガの原因となります。



衝撃禁止

不安定な場所に置かない。
また、本体に重い物を置く、使用中の落下、ぶつけるなど強い衝撃を与えない。
ケガ・故障の原因となります。



必ず守る

本体が落下、破損した場合は、直ちに使用を中止し、電源スイッチを切って電源プラグをコンセントから抜き、必ず修理・点検を依頼する。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



水かけ禁止

本体やACアダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

警告



必ず守る

必ず交流100~240Vで使用する。(無料修理は国内のみ)
火災・感電・故障の原因となります。



禁止

本体やACアダプターに亀裂などの損傷が生じているときは使用しない。
火災・感電・ケガ・故障の原因となります。



必ず守る

本体やACアダプターに水・異物等が入った場合は、ただちに使用を中止し、点検を依頼する。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



プラグを抜く

ACアダプターを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

使用中は同じ箇所当て続けられない。必ず肌の上を動かしながら使用する。
ケガ・肌トラブル・やけどの原因となります。



禁止

必要以上に強く押しあてない。



必ず守る

必ず専用のACアダプターを使用する。
ACアダプターは、壁面コンセントに直接差し込み、タコ足配線しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。



無理な扱い禁止

ACアダプターを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。
また、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない。ACアダプターが破損し、火災・感電の原因となります。



コード引っ張り移動禁止

ACアダプターを引っ張って本体を移動したり、持ち上げたりしない。
感電・ショート・発火・断線の原因となります。



必ず守る

コード類は足元の邪魔にならないようにする。
事故・断線の原因となります。



禁止

ACアダプターを発熱器具に近づけない。
火災・感電の原因となります。



傷んだコードプラグ使用禁止

ACアダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

⚠ 注意



必ず守る

地震や雷を感じたら直ちに使用を中止する。また、速やかに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く。誤作動による火災・事故やケガの原因となります。



必ず守る

機器に異音・異臭・異常発熱などの異常が発生したら、直ちに使用を中止し、必ず修理を依頼する。そのまま使用すると破損・発火・事故の原因となります。



禁止

機器を強く押したり、叩いたり、尖ったものなどで突いたりしない。故障の原因となります。



禁止

ヘッド面を金属・物にあてない。発熱・発火・故障・破損の原因となります。使用時以外は付属のスタンドをご利用ください。



発火注意

火のそばや炎天下、浴室などの高温多湿の場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置しない。また、火中投入・加熱・高温での使用をしない。熱器具に近づけない。

発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



必ず守る

本体のヘッド面は、使用前、使用後に必ず水で湿らせて固くしぼった布で表面の汚れを拭きとる。



禁止

施術中はお客様から離れない。事故やケガの原因となります。



禁止

通電したまま放置しない。事故・トラブルの原因となります。



禁止

オーバーケアしない。ケガ・肌トラブルの原因となります。



必ず守る

使用時間は取扱説明書の指示を守る。事故・肌トラブルの原因となります。

⚠ 注意



禁止

本体をアルカリ洗剤やアルコール・シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・除光液などの溶剤・薬品で拭かない。本体の表面に損傷を与え原因となります。



必ず守る

使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外す。事故・肌トラブルの原因となります。



必ず守る

お客様にご気分を伺いながら使用する。途中で気分が悪くなったり、お肌に異常があらわれた場合は、使用を中止する。キャビテーション機器は超音波を使用しているため、施術を受けている方だけに高い音が聞こえる骨伝導現象が起こり、気分がすぐれなくなる場合があります。



プラグを抜く

お手入れするときは必ず電源をオフにし、使用しないときはACアダプターを壁面コンセントから抜く。またぬれた手で抜き差しはしない。感電・ショート・発火の原因となります。



必ず守る

本体が汚れた場合は水やぬるま湯を含ませた柔らかい布で拭き取った後、乾拭きする。故障の原因となります。



必ず守る

初めて使用するときや慣れるまでは、必ずレベル1から使用する。(RF, CAV, EMSモード) 事故やケガの原因となります。



必ず守る

痛感や体調不良を訴えられた時は、直ちに使用を中止する。事故・肌トラブルの原因となります。



必ず守る

使用後は、電源を切って電源プラグをコンセントから抜く。火災・事故の原因となります。



必ず守る

使用後は毎回、「使い終わったら」(P.17)を参照して、製品に付着したジェルなどを取り除く。故障、肌トラブルの原因となります。



必ず守る

長時間使用しなかった場合、再使用する前には正常に作動するか点検する。事故や故障の原因となります。

⚠ 注意

以下の項目は必ず守る。

事故やケガ、本体が故障する原因となります。

- ・ 同じ箇所に設定時間以上の使用は避ける。(P.13~16参照)
- ・ お肌の状態にあわせて使用する。
- ・ お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
- ・ 日焼け直後、ピーリングやパックのケアとの併用は控える。
- ・ 使用後は必ず電源を切る。



必ず守る



必ず守る

ヘッド面とお肌との間に、常にジェルがあるように、途中で補充する。

化粧品等が少ないと、RF・CAV・EMSの伝達が悪くなり効果が低下したり、肌トラブルの原因となります。

次の様な場所で本体を使用・保管しない。

- ・ 浴槽などの湿気の多い場所・直射日光のあたる場所
- ・ 屋外・水などのかかる場所・傾斜、振動、衝撃のある場所
- ・ 強い電波や磁気の発生する場所・年少者の手の届く場所
- ・ 発熱機器(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
- ・ 温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)

感電・ショート・発火・故障・転倒の原因となります。



禁止

メーカーから推奨しているものまたは化粧品(使用に適さないものを除く)、水以外は使用しない。

肌トラブル、故障の原因となります。

<使用に適さない化粧品等>

- ・ オイル系 ・スクラブ系 ・刺激の強い化粧水 ・ボディソープ
- ・ 温感効果のある化粧水、マッサージジェル



禁止



プラグを抜く

長時間、使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く。
感電・ショート・発火の原因となります。




必ず守る

本製品を廃棄する時は、自治体の廃棄処理に関連する条例または規則に従う。


各部のなまえ

●本体

(操作表示面)

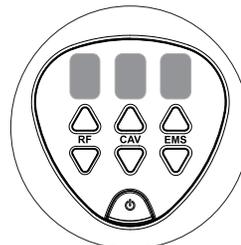


(ヘッド面)

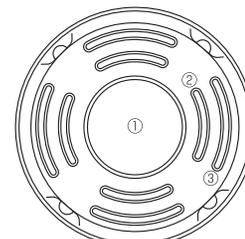

- ①中央ヘッド(CAV[キャビテーション]、EMS)
- ②内リング(RF)
- ③外リング(RF、EMS)



(側面)

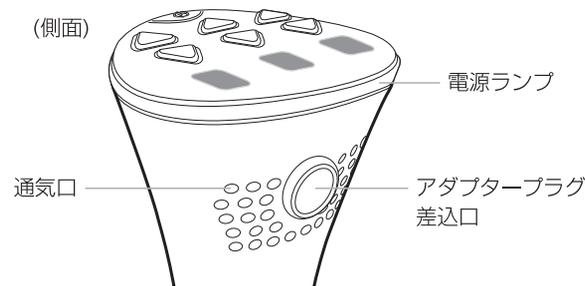

●付属品

・ ACアダプター …………… 1個


・ スタンド …………… 1個

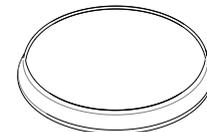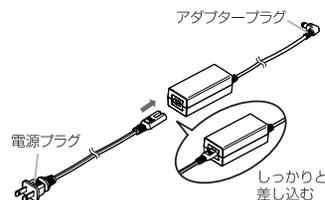

※ ACアダプターは本製品専用です。

※ 本体及び付属品のデザイン、仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。

操作表示面と操作方法

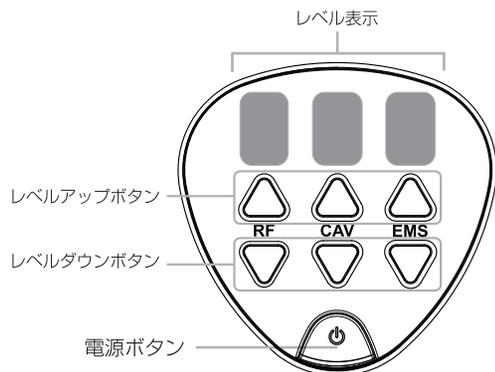

●電源ボタン

長押し(約3秒)すると、電源をオン/オフします。

・スタンバイ

電源をオンにすると、電源ランプが青点灯し、スタンバイ状態(RF・CAV・EMSのいずれも出力されていない状態)となります。

※スタンバイ状態のまま約3分間操作しないと、自動的に電源がオフになります。

・オートオフタイマー

各モードのレベルアップボタンを押して、動作が開始してから約20分経つと自動的に電源がオフになります。

●レベルアップボタン

各モードのレベルアップボタンを押すたびにレベルが上がります。

各モードのレベル表示が非表示の場合はボタンを押すとそのモードがオンになります。

●レベルダウンボタン

各モードのレベルダウンボタンを押すたびにレベル下がります。

各モードのレベル表示が1の場合はボタンを押すとそのモードがオフになります。

●レベル表示

各モードのレベルを数字でお知らせします。


RF : 1～9段階

CAV : 1～3段階

EMS : 1～9段階

施術開始前の確認

- お客様は空腹または満腹ではありませんか？
- キャビテーションの施術が初めてのお客様には骨伝導により多少の不快感がすることをご説明ください。
- 本機は肩より上(首、顔)等には使用できません。
- 長時間(1部位20分以上)の施術はお控えください。

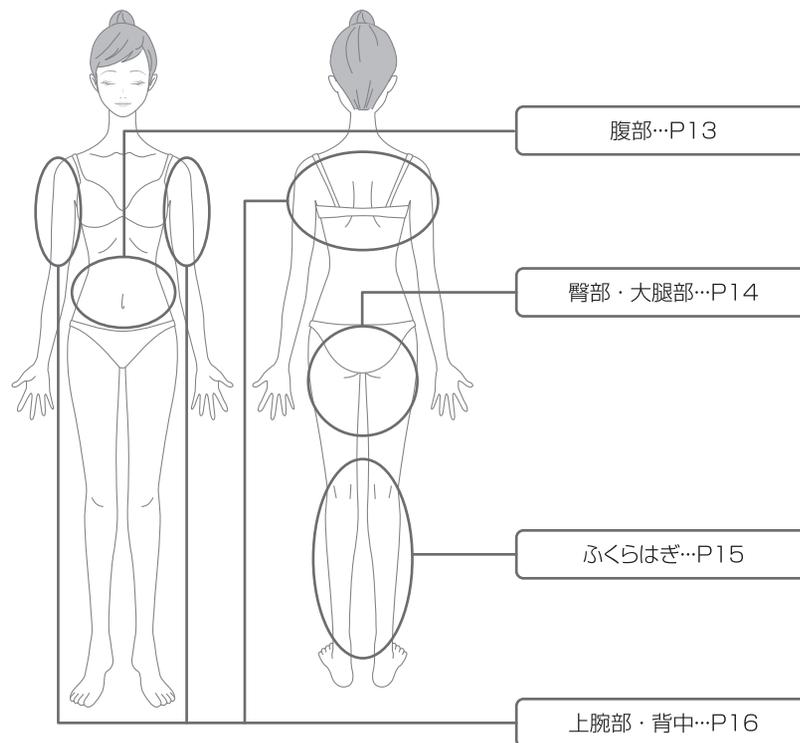

※ここで説明する施術方法はあくまでも基本的な方法になります。実際の施術時はお客様に合わせた施術を行ってください。

基本の使いかた

1 ACアダプターをアダプタープラグ差込口と壁面コンセントに差し込む。

※ACアダプターをアダプタープラグ差込口と壁面コンセントに差し込むと、本体から「ブーン」という音がしますが、ファンの動作音ですので、異常・故障ではありません。

2 施術を行う部分に、ジェルを塗る。

3 電源ボタンを長押し(約3秒)し、電源をオンする。

・電源ランプが青点灯し、スタンバイ状態となります。
 ※スタンバイ状態のまま約3分間操作しないと、自動的に電源がオフになります。


4 各モードのレベルアップボタンを押してモードとレベルを選択する。(P. 9参照)

・3つのモードを同時選択すると、電源ランプが紫点灯に変わります。

5 施術する部位の肌の上を動かしながら使用する。

・部位ごとのケアの方法については、P.13~P.16を参照してください。

●お肌へのあてかた
 必ず下図のようにヘッド面をお肌に対して垂直にあててください。

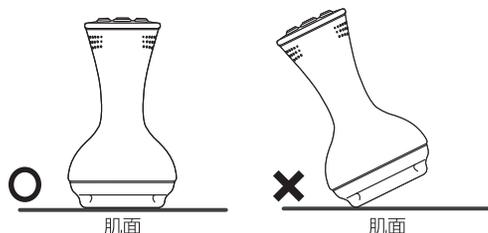

6 ケアが終了したら、電源ボタンを長押し(約3秒)し、電源をオフする。

各モードのレベルアップボタンを押して、動作が開始してから約20分経つと自動的に電源がオフになります。

※電源オフ後もファンは停止しません。



注意


- ・使用禁止部位(P.2)にはどのモードでも絶対に使用しないでください。
- ・RF、CAVモード使用中は必ずお肌の上を動かして使用してください。
- ・化粧品はメーカーから推奨のものをお使いください。
 お手持ちの化粧品を使用する場合、下記の使用に適さない化粧品は肌トラブル、故障の原因となりますので使用しないでください。
 <使用に適さない化粧品等>
 - ・オイル系
 - ・スクラブ系
 - ・刺激の強い化粧水
 - ・ボディソープ
 - ・温感効果のある化粧水、マッサージジェル

連続で使用される場合のご注意

本製品は動作開始から約20分経過すると自動的に電源がオフになります。(オートオフタイマー機能)

連続で使用される場合はオートオフタイマー後ACアダプターをつないだまま(電源オフ状態)で3分間休ませて本体を冷やしてください。

※ACアダプターをつないだままにすることでファンが回転し本体内部を素早く冷まします。

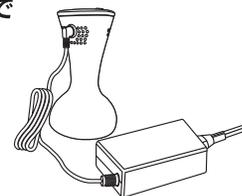

本体内部が高温になると故障の原因になりますので、長く安心してご愛用いただくためにオートオフタイマー後は本体を冷やす時間を設けることをお勧めいたします。


腹部の施術

1 施術を行う部分にジェルを塗布してください。

2 施術の方法

※初めて使用の場合は、全てレベル「1」からご使用ください。

片方の手で本体を持ち、お肉の多い箇所にヘッドをあてます。
そのときヘッドをあてる先にもう片方の手を添えます。
お肉の上を上下に、又は左右に滑らせます。このとき骨は避けてください。
1秒間に2～5cmを目安に、押しつけるように動かしてください。

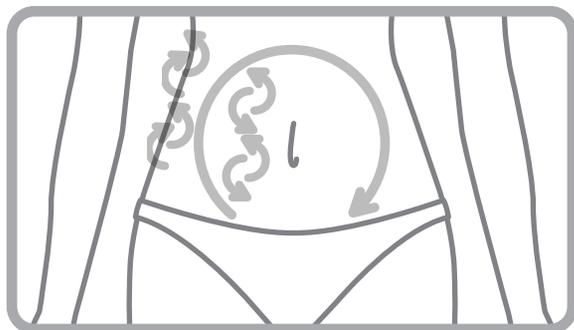

※RF・CAVを使用する際は、一ヶ所にとめず、必ずお肌の上を動かしながら使用してください。

施術時間の目安

10分～20分

※施術時間が長くなり過ぎないようにご注意ください。


臀部・大腿部の施術

1 施術を行う部分にジェルを塗布してください。

2 施術の方法

※初めて使用の場合は、全てレベル「1」からご使用ください。

片方の手で本体を持ち、お肉の多い箇所にヘッドをあてます。
そのときヘッドをあてる先にもう片方の手を添えます。
お肉の上を上下に、又は左右に滑らせます。このとき骨は避けてください。
1秒間に2～5cmを目安に、押しつけるように動かしてください。

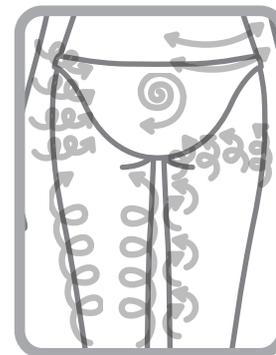

※RF・CAVを使用する際は、一ヶ所にとめず、必ずお肌の上を動かしながら使用してください。

施術時間の目安

臀部 10分・大腿部 片側 5分

※施術時間が長くなり過ぎないようにご注意ください。


ふくらはぎの施術

1 施術を行う部分にジェルを塗布してください。

2 施術の方法

※初めて使用の場合は、全てレベル「1」からご使用ください。

片方の手で本体を持ち、ふくらはぎにヘッドをあてます。
そのときヘッドをあてる先にもう片方の手を添えます。
お肉の上を上下に、又は左右に滑らせます。このとき骨は避けてください。
1秒間に2~5cmを目安に、押しつけるように動かしてください。

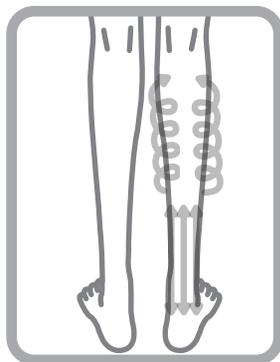

※RF・CAVを使用する際は、一ヶ所にとめず、必ずお肌の上を動かしながら使用してください。

施術時間の目安

ふくらはぎ 片側5分

※施術時間が長くなり過ぎないようにご注意ください。


上腕部・背中の施術

1 施術を行う部分にジェルを塗布してください。

2 施術の方法

※初めて使用の場合は、全てレベル「1」からご使用ください。

片方の手で本体を持ち、お肉の多い箇所にヘッドをあてます。
そのときヘッドをあてる先にもう片方の手を添えます。
お肉の上を上下に、又は左右に滑らせます。このとき骨は避けてください。
1秒間に2~5cmを目安に、押しつけるように動かしてください。

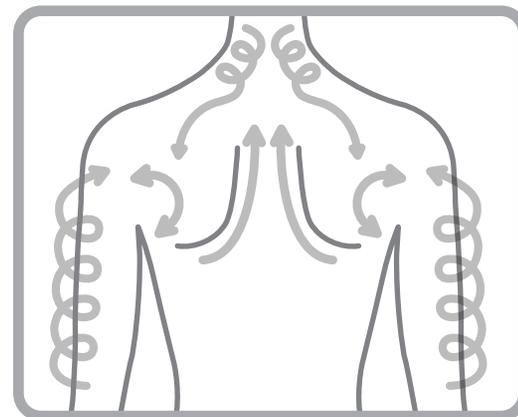

※RF・CAVを使用する際は、一ヶ所にとめず、必ずお肌の上を動かしながら使用してください。

施術時間の目安

背中 10分・片腕 5分

※施術時間が長くなり過ぎないようにご注意ください。

お手入れのしかた

ヘッド面は、**使用後に毎回必ずお手入れしてください。**

製品の故障・動作不良を防ぐために、定期的にお手入れしてください。

お手入れする際は必ず電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いてください。

●本体のお手入れ

1 ヘッド面についた化粧水、ジェルなどを拭き取る。

2 水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れを拭き取る。

- ・ 汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。
- ・ アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。



3 アダプタープラグ差込口についた水滴や汚れを拭き取る。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体のお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストープやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のあたる場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.19～P.20)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえ下記ヤーマンコールセンターまでご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

お問い合わせ先

ヤーマンコールセンター

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

固定電話など
☎ 0120-20-776-282(通話料無料)
携帯電話・PHS
☎ 0570-550-637(通話料有料)

※ 修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※ 月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合には、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっております。

こんなときには

困ったときは

本製品をご使用中に異常や、以下の症状がみられる場合は、原因と処置方法をご確認ください。

こんな症状	考えられる原因	処置方法
電源が入らない	電源ボタンを長押ししていない	電源ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンしてください
	ACアダプターが本体に差し込まれていない	アダプタープラグをしっかりと奥まで差し込んでください
電源が切れる	オートオフタイマーが働いた(P.9参照)	
RFがでない(感じない)	使用したい部位をぬらしていない お肌が乾燥している	化粧品でたっぷりとぬらしてください(化粧品の種類によってはRFが感じにくい場合もあります)
	レベルが低い	RFのレベルアップボタンを押してレベルを上げてください
	動かす速さが速い	動かす速さの目安: 1秒間に約2~5cm
	ヘッド面が垂直にお肌にあたっていない	ヘッド面がお肌に対して垂直にあたるようにしてください(P.11参照)
RFが熱い	1箇所にあて続けている/ 動かす速さが遅い	動かす速さの目安: 1秒間に約2~5cm
	ヘッド面がお肌にしっかりとあたっていない	ヘッド面がお肌に対して垂直にあたるようにしてください(P.11参照)

こんな症状	考えられる原因	処置方法
RFが熱い	レベルが高い	RFのレベルダウンボタンを押してレベルを下げてください
中央ヘッドが熱い	CAVの振動によりヘッドが温まった	熱すぎる場合は使用を中止し10分程度経ってから電源をオンしてください
CAVがでない(感じない)	微小な振動のためほとんど体感がありません	
CAV使用時に音が鳴る	振動している音です 問題ありません	
EMSがでない(感じない)	使用したい部位をぬらしていない	化粧品でたっぷりとぬらしてください
	レベルが低い	EMSのレベルアップボタンを押してレベルを上げてください
EMSが痛い	感じにくい部位にあてている	あてる部位を変えてください
	ヘッド面が肌にしっかりとあたっていない	ヘッド面がお肌に垂直にあたるようにしてください(P.11参照)
本体から「ブーン」という音がする	レベルが高い	EMSのレベルダウンボタンを押してレベルを下げてください
	ファン動作音です ので、異常・故障ではありません	
本体が熱い	連続使用により本体内部が高温になった	ACアダプターをつないだまま(電源オフ状態)で3分間休ませて本体を冷やしてください

●廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体により回収方法が異なりますので確認のうえ、処分願います。

●製品仕様

定 格	DC12V 5.0A
消費電力	最大約30W
外形寸法	約190×110×110 (mm)
製品質量	約510g
製造国	日本
材 質	本体:PET樹脂、ポリカーボネート (ヘッド部:PET樹脂、ステンレス)
セット内容	本体……1台 ACアダプター……1個 スタンド……1個 メソスタイルジェル プレミア ……1個

●保証について

- ・ 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします。(消耗品、付属品は除く)
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただくことがあります。
- ・ 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- ・ 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、
無料修理規定の説明をよくお読みください。
- ・ 万一、故障が生じた場合は、お買い上げの販売店またはお問い合わせ先(P.18)にご相談ください。

付属化粧品

メソスタイルジェル プレミア

肌引き締め美容成分を贅沢に配合した業務用ジェル

キャビテーション・RF・EMSに使用可能なので塗り替えなしでコスト削減・時間短縮

商 品 名：メソスタイルジェル プレミア

内 容 量：500g

品 番：CS18004

単品価格：6,300円(税抜)

商品詳細・お買い求めはヤーマンプロフェッショナルオンライン
サイトよりお問い合わせください。

WEBサイト <http://pro.ya-man.com>

※予告なく単品価格の変更、商品の販売を終了する場合があります。

