

No. _____

保証書

持込修理

品 名	業務用エステ機器	型 番	PSM-90H-A
形 名	キャビスパ for Pro プレミア II		
無料修理保証	対象部分: 本体のみ		期間: お買い上げ日から1年間
※販売者名	店名・住所・電話	ご購入時のわかる明細を貼付 または保証書に記載させて 保管してください。	見本

販売店様へのお願い 必ず印欄をご記入・捺印の上お客様へお渡しください。

本書は本書記載内容により無料修理を行なうことを約束するものです。

上記「無料修理保証期間」中に故障が発生した場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

●所定印欄が空欄のままだりお買い上げ印がわざるレシート・明細書がございませんと、本書は有効とはなりません。

●本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本製品添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ販売店が無料修理いたします。
- 保証期間内に依頼して無料修理を受ける場合は、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店に依頼してください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店にご連絡ください。
- ご贈答品で本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合は、下記お問い合わせさせてご相談ください。
- 保証期間中でも、つぎの場合は有料修理になります。
 - (イ) お客様のご使用による劣化・消耗と認められる場合
 - (ロ) 電池や消耗品、付属品などの部品交換の場合
 - (ハ) 以下①~⑨か原因による故障および損傷の場合
 - ①使用上の誤り ②お買い上げ後の輸送、転倒・落丁・落丁
 - ③弊社以外の第三者による修理・改造、④高湿・多湿等の温度・湿度の環境下での使用 ⑤接続する他の機器の異常
 - ⑥(家庭用製品の専用工具等) 想定を大幅に超える長時間又は通常電圧下での使用 ⑦(説明書等で指定がある場合) 指定方法以外での給電 ⑧非純正部品の使用
 - ⑨車両・船舶への搭載 ⑩海外でのご使用
 - 6. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

※ 本書はこれに明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

※ご使用による劣化・消耗及び消耗品の交換は有料となります。

※その他の修理の条件を含む詳細については、弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>) および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty/>) をご確認ください。

※製造から相当の期間を経てお修理・交換用部品の手配が難しくなった製品に関しては、お客様のお買い上げ日にかかるわざ、保証を打ち切らせて頂く場合がございます。

その他の修理の条件も含め詳細は弊社ホームページ「製造終了品」(<https://www.ya-man.co.jp/end-of-sale/>) および「ヤーマン製品保証約款」(<https://www.ya-man.co.jp/warranty/>) をご確認ください。**個人情報の取扱いについて**個人情報の取扱いについては弊社ホームページ(<http://www.ya-man.com/shop/app/page/privacy-policy/>)をご参照ください。**利用目的**

お客様の個人情報はご依頼いただきました修理品の返送のために利用いたします。

また、お問い合わせの対応やその後の安全点検活動のため、記録を残すことがあります。

これらの記録は正当な理由がある場合を除き、第三者へ提供しません。

製造元**ヤーマン株式会社**

ヤーマンコールセンター受付 9:00~17:00(土日祝日・年末年始除く)

固定電話など

0120-776-282 (通話料無料)

携帯電話・PHS

0570-550-637 (通話料有料)[www.ya-man.com/
biz/professional/](http://www.ya-man.com/biz/professional/)

PSM90HA-1-001

— PROFESSIONAL —
YAMAN


取扱説明書

業務用エステ機器

キャビスパ for Pro プレミア II

PSM-90H-A

保管用
保証書付

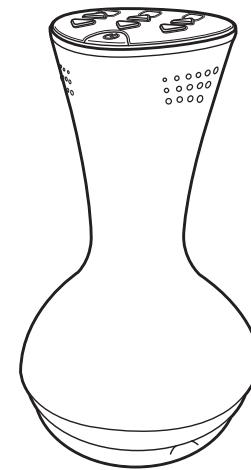**もくじ**

安全上のご注意	1
海外でのご使用について	7
各部のなまえ	8
ご使用の前に	9
使いかた	11
使い終わったら	17
こんなときには	19
アフターサービス	21
●製品仕様	21
●保証について	22
保証書	23

このたびは、ヤーマンプロフェッショナル製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

●正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

●お読みになった後は、いつでも確認できる場所に必ず保管してください。

●本製品を他の人に譲渡するときはこの取扱説明書を必ず添付してください。

安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 定められた手順に従って、無理のないご使用をお願いします。
- 異常が発生した場合は、ただちに使用を中止し修理を依頼してください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容を記載しておりますので必ずお守りください。
- 注意区分は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをしてしまうことで生じると想定される内容を「危険」「警告」「注意」に区別しています。

●注意区分について



危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。



警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容です。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

●図記号について(次は図記号の例です。)



してはいけないことを示しています。



しなければならないことを示しています。



注意しなければならないことを示しています。



危険

次に該当する人は使用しない。

医用電気機器の誤動作を招く原因となります。



●医用電気機器を使用している人

- ペースメーカーなど体内植込式医用電気機器
- 人工心肺など生命維持用医用電気機器
- 心電計などの装着型医用電気機器

ケア中は、お客様から離れない。

事故の原因となります。

警告



次のような人は使用しない。

事故やトラブルの原因になります。

- 妊娠初期から出産直後までの間
- 子宮内膜症や子宮筋腫など子宮に疾患のある人
- 心臓疾患、障害及びその疑いのある人
- 幼児や自分で意思表示できない人
- 温度や刺激の感覚が自覚できない人
- 自己免疫疾患のある人

次の人はご使用前に医師にご相談ください。

- 急性疾患の人
- 感染症疾患の人
- 悪性腫瘍のある人
- 有熱性疾患の人
- 高血圧の人や血液疾患のある人
- 発熱している人
- 糖尿病などの高度な末梢循環機能障害による知覚障害のある人
- 神経障害のある人
- 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
- 通院して薬を服用中の間
- アレルギー体質、接触性皮膚炎等、皮膚に既往症のある人や使用に際してお肌に不安のある人



禁止

次のような場合や部位には使用しない。

事故やトラブルの原因となります。

- お肌に傷や発疹、炎症等の異常がある場合
- 酒気帯びの場合
- 頭部、顔、首
- 口内や陰部、粘膜など
- 眼球
- まぶた(眼窩)
- のど
- 膨らんだホクロ
- ウイルス性のイボ
- 骨折をしている部位
- 美容医療施術後に内出血や腫れ、かさぶた等の有る部位

※施術後2週間はご使用を控えていただき、医師にご相談の上、問題なければご使用いただけます。

●外科手術(形成、整形、美容)等で体内に金属を埋め込んだ部位

ご自身で判断ができない場合は使用前に医師にご相談ください。



頭部、顔、首には絶対に使用しない。

禁止

ケガの原因となります。



過度の空腹、満腹時に使用しない。

胃腸内の水分に超音波が反応し、気分が悪くなる場合があります。



取扱説明書は、大切に保管する。

必ず守る



取扱説明書に記載されている用途・部位以外には使用しない。

禁止

故障・けがの原因となります。



警 告

禁止
使用前にヘッド面の割れ、変形、破損がないか確認し、
破損・故障した場合は、使用しない。

お肌の傷などのトラブルや、
症状悪化の原因となります。

必ず守る
電源プラグとコンセントを定期点検する。
火災・感電の原因となります。

分解禁止
分解や修理・改造はしない。
火災・感電・ケガの原因となります。
修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

禁止
ケアをする人以外は操作しない。
事故・故障の原因となります。

禁止
本体やACアダプターに亀裂などの損傷が生じているときは使用しない。
火災・感電・ケガ・故障の原因となります。

禁止
電源をオンにした状態で他の美容機器や電気製品に接触させない。
他の電気製品(電気毛布・敷布・こたつ等)との同時使用はしない。
誤動作による事故のおそれがあります。

必ず守る
始業点検を必ず実施し、異常を発見した場合は、直ちに点検修理を依頼する。
事故・故障の原因となります。

衝撃禁止
不安定な場所に置かない。
また、本体に重い物を置く、
使用中の落下、ぶつけるなど強い衝撃を与えない。
ケガ・故障の原因となります。

必ず守る
機器を落としたり破損したりした場合は、直ちに電源をオフにしてプラグを抜き、必ず修理・点検を依頼する。
火災・感電の原因となります。

水かけ禁止
本体やACアダプターを水につけたり、水をかけたり、水洗いしない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

禁止
子供の手の届かない場所に保管し、使わせない。また、子供に遊ばせない。
事故・けがの原因となります。

禁止
火のそばや炎天下、高温多湿、埃っぽい場所、可燃性ガス、燃えやすいもののそばに放置しない。また、火中投下したり、熱器具に近づけない。
発熱・発火・破裂の動作不良の原因となります。



警 告

禁止
専用のACアダプター以外は使用しない。
感電・ショート・発火の原因となります。

必ず守る
必ず交流100~240Vで使用する。
コンセントは根元まで確実に差し込む。
火災・感電・事故の原因となります。
※無料修理保証は国内でのご使用に限ります。

プラグを抜く
ACアダプターを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜く(金属部に触れないようにする)。また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電・ショート・発火の原因となります。

傷んだコードプラグ使用禁止
ACアダプターが傷んだり、コンセントの差しみがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。修理はお買い上げの販売店窓口にご相談ください。

禁止
強く押しあてず、一ヶ所に集中して使用しない。
必要以上に強く押し付けたり一ヶ所に集中して使用するとお肌を傷める原因となります。

プラグを抜く
停電した時は、直ちに電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。
事故のおそれがあります。

無理な扱い禁止

コード引っ張り移動禁止
ACアダプターを引っ張って本体を移動したり、持ち上げたりしない。
感電・ショート・発火・断線の原因となります。

必ず守る
痛みや体調不良を訴えられた時は、直ちに使用を中止する。
事故・身体のトラブルの原因となります。

必ず守る
コード類は足元の邪魔にならないようする。
事故・断線の原因となります。

禁止
使用中に、プラグをコンセントから抜いたり、本体側からプラグを抜かない。
感電・ショートによる発火・火災の原因となります
必ず電源をオフにしてからプラグを抜いてください。

タコ足配線の禁止
コンセントや配線器具の定格容量を超えて配線(タコ足配線)しない。
感電・ショート・発火・故障の原因となります。

⚠ 注意

 地震や雷を感じたら電源をオフにし、プラグを抜く。火災・感電のおそれがあります。

 通電したまま放置しない。火災・事故の原因となります。

 必ず守る
本体のヘッド面は、使用前、使用後に必ず水で湿らせて固くしぼった布で表面の汚れを拭きとる。

 禁止
本体をアルカリ洗剤やアルコール・シンナー・ベンジン・ガソリン・灯油・除光液などの溶剤・薬品で拭かない。本体の表面に損傷を与える原因となります。

 必ず守る
お客様にご気分を伺いながら使用する。途中で気分が悪くなったり、お肌に異常があらわれた場合は、使用を中止する。キャビテーション機器は超音波を使用しているため、施術を受けている方だけに高い音が聞こえる骨伝導現象が起り、気分がすぐれなくなる場合があります。

 必ず守る
使用後は毎回、「使い終わったら」(P.17)を参照して、製品に付着したジェルなどを取り除く。故障、肌トラブルの原因となります。



ヘッド面を金属・物にあてない。
発熱・発火・故障・破損の原因となります。使用時以外は付属のスタンードをご利用ください。



オーバーケアをしない。
使用時間や使用頻度は、取扱説明書の指示を守る。身体に危害を与える原因となります。



必ず守る
機器に異音・異臭・異常発熱などの異常が発生したら、直ちに使用を中止し、必ず修理を依頼する。そのまま使用すると破損・発火・事故の原因となります。



必ず守る
使用時には身体から金属類(時計・ネックレス・指輪・イヤリング)を外す。事故・けがの原因となります。



必ず守る
必ずレベル1から使用し、お客様の様子を伺いながら使用する。(RF,CAV,EMSモード)
事故・けがの原因となります。



必ず守る
使用後は、電源を切って電源プラグをコンセントから抜く。火災・事故の原因となります。



必ず守る
長時間使用しなかった場合、再使用する前には正常に作動するか点検する。事故や故障の原因となります。

⚠ 注意

以下の項目は必ず守る。

- 事故やケガ、本体が故障する原因となります。
- 同じ箇所に設定時間以上の使用は避ける。(P.13~16参照)
- お肌の状態にあわせて使用する。
- お肌に発疹、炎症、かゆみ等の異常を起こしている場合は使用しない。
- 日焼け直後、ピーリングやパックのケアとの併用は控える。
- 使用後は必ず電源を切る。



ヘッド面とお肌との間に、常にジェルがあるように、途中で補充する。化粧品等が少ないと、RF・CAV・EMSの伝達が悪くなり効果が低下したり、肌トラブルの原因となります。



次のような場所で機器を使用・保管しない。

- 浴室や浴槽、シャワー、洗面器又は水の入った他の容器の近く
 - ほこりの多い場所・直射日光の当たる場所や屋外
 - 傾斜・振動・衝撃のある場所・強い電波や磁気の発生する場所
 - 引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近く
 - 油煙、湯気の当たる場所
 - 発熱器具(ストーブ等)の近くなど高温になる場所
 - 温度変化の激しい場所(エアコン、暖房器具のそば)
- 火災・感電・事故・故障・転倒・けがの原因となります。



メーカーから推奨しているものまたは化粧品(使用に適さないものを除く)、水以外は使用しない。

肌トラブル、故障の原因となります。

<使用に適さない化粧品等>

- オイル系
- スクラブ系
- 刺激の強い化粧水
- ボディソープ

・温感効果のある化粧水、マッサージジェル



必ず守る
プラグを抜く
使用後および機器のお手入れをするときは、必ず電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜く。火災・事故の原因となります。



長時間、使用しない時は、電源プラグをコンセントから抜く。感電・ショート・発火の原因となります。

警告



必ず交流100~240Vで使用する。(無料修理は日本国内のみ)
必ず守る
火災・感電・故障の原因となります。




必ずプラグ形状・電圧を確認のうえ使用すること。
発火注意
発熱・発火・故障の原因となります。


- 地域、宿泊先によってもプラグ形状、電圧が異なる場合があります。必ずご確認のうえご使用ください。
- プラグ変換アダプターについては旅行会社、家電量販店等にご相談ください。

●本体

(操作表示面)

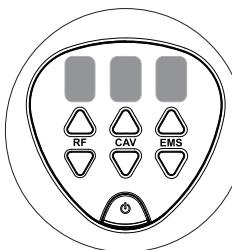


(ヘッド面)

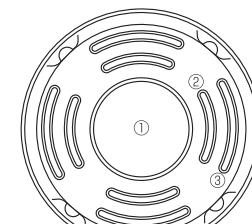



- ①中央ヘッド(CAV[キャビテーション]、EMS)
- ②内リング(RF)
- ③外リング(RF、EMS)

(側面)

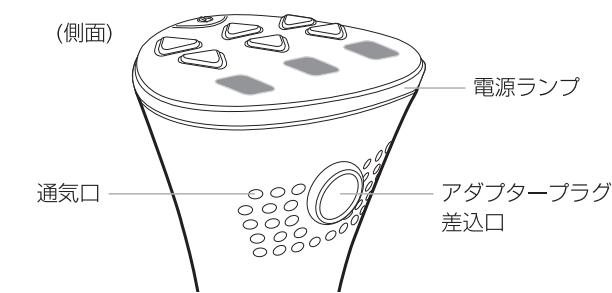

●付属品

- ・ACアダプター 1個
- ・スタンド 1個

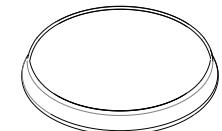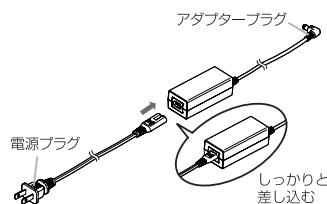


※ ACアダプターは本製品専用です。

※ 本体及び付属品のデザイン、仕様は品質向上のため予告なく変更する場合があります。

ご使用の前に

操作表示面と操作方法

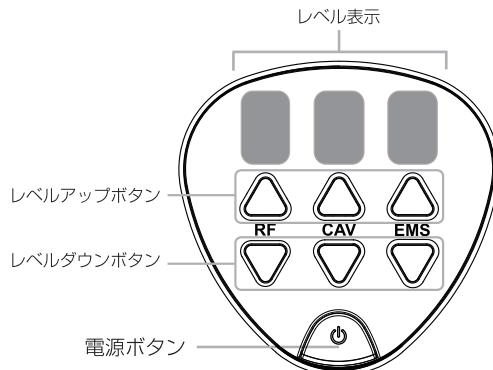

●電源ボタン

長押し(約3秒)すると、電源をオン/オフします。

・スタンバイ

電源をオンにすると、電源ランプが青点灯し、スタンバイ状態(RF・CAV・EMSのいずれも出力されていない状態)となります。

※スタンバイ状態のまま約3分間操作しないと、自動的に電源がオフになります。

・オートオフタイマー

各モードのレベルアップボタンを押して、動作が開始してから約20分経つと自動的に電源がオフになります。

●レベルアップボタン

各モードのレベルアップボタンを押すたびにレベルが上がります。

各モードのレベル表示が非表示の場合はボタンを押すとそのモードがオンになります。

●レベルダウンボタン

各モードのレベルダウンボタンを押すたびにレベルが下がります。

各モードのレベル表示が1の場合はボタンを押すとそのモードがオフになります。

●レベル表示

各モードのレベルを数字でお知らせします。


RF : 1~9段階

CAV : 1~5段階

EMS : 1~9段階

施術開始前の確認

- お客様は空腹または満腹ではありませんか?
- キャビテーションの施術が初めてのお客様には骨伝導により多少の不快音がすることをご説明ください。
- 本機は肩より上(首、顔)等には使用できません。
- 長時間(1部位20分以上)の施術はお控えください。

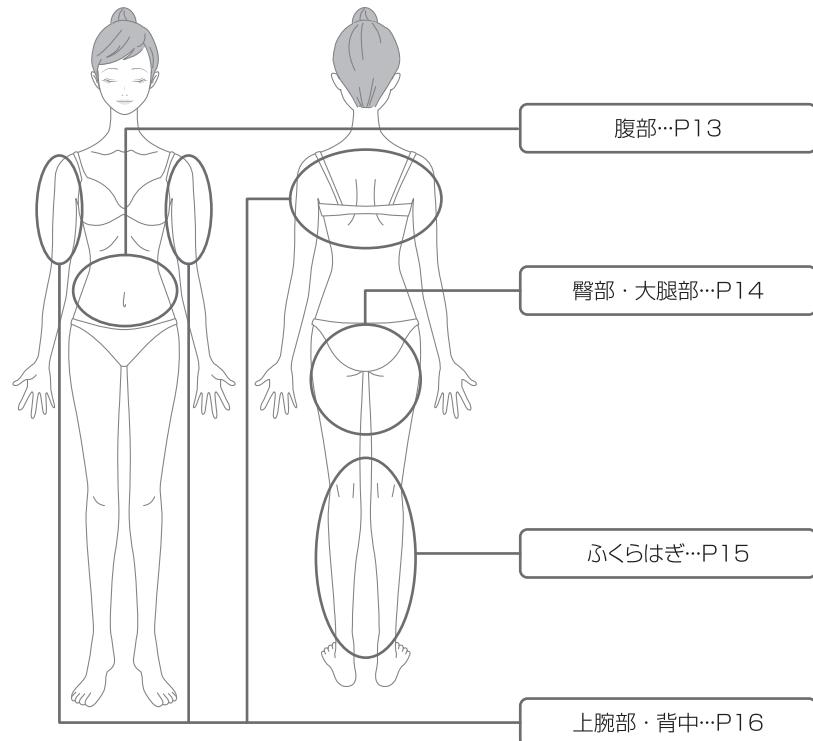

※ここでご説明する施術方法はあくまでも基本的な方法になります。
実際の施術時はお客様に合わせた施術を行ってください。

使いかた

基本の使いかた

<使用前に>

水で湿らせて固くしぼった布で、本体のヘッド面の汚れを拭き取る

1 ACアダプターをアダプタープラグ差込口と壁面コンセントに差し込む。

※ACアダプターをアダプタープラグ差込口と壁面コンセントに差し込むと、本体から「ブーン」という音がしますが、ファンの動作音ですので、異常・故障ではありません。

2 施術を行う部分に、ジェルを塗る。

3 電源ボタンを長押し(約3秒)し、電源をオンする。

・電源ランプが青点灯し、スタンバイ状態となります。
※スタンバイ状態のまま約3分間操作しないと、自動的に電源がオフになります。

4 各モードのレベルアップボタンを押してモードとレベルを選択する。(P.9参照)


・3つのモードを同時選択すると、電源ランプが紫点灯に変わります。

5 施術する部位の肌の上を動かしながら使用する。

・部位ごとのケアの方法については、P.13～P.16を参照してください。

●お肌へのあてかた

必ず下図のようにヘッド面をお肌に対して垂直にあててください。

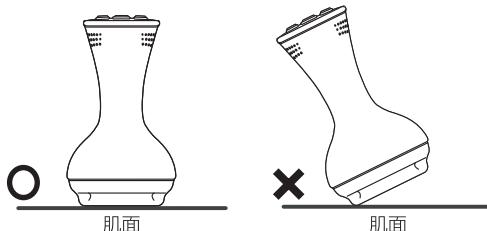

6 ケアが終了したら、電源ボタンを長押し(約3秒)し、電源をオフする。

各モードのレベルアップボタンを押して、動作が開始してから約20分経つと自動的に電源がオフになります。

※電源オフ後もファンは停止しません。

- ・施術中に通気口を塞いだり、ジェルが付かないよう注意する
通気口が塞がると故障の原因となります。
- ・施術中にジェルの付着した手で通気口に触れないようご注意ください。
- ・通気口にたまつたホコリはこまめに取り除いてください。
- ・使用禁止部位(P.2)にはどのモードでも絶対に使用しないでください。
- ・RF、CAVモード使用中は必ずお肌の上を動かして使用してください。
- ・化粧品はメーカーから推奨のものをお使いください。
お手持ちの化粧品を使用する場合、下記の使用に適さない化粧品は肌トラブル、故障の原因となりますので使用しないでください。




注意



ACアダプターの取扱いについてのご注意

コードに負荷がかかり断線する要因となりますので、以下の点に注意してご使用ください。

- ・施術中にコードの曲げ伸ばしを繰り返さないでください。
- ・施術中や収納時にコードを急角度で折り曲げないでください。
- ・収納時にコードを本体に巻き付けないでください。
- ・コードを引っ張って本体を移動したり持ち上げたりしないでください。
- ・コードは足元の邪魔にならないように配置してください。

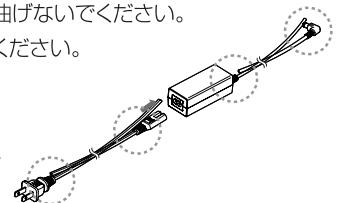


連続で使用される場合のご注意

本製品は動作開始から約20分経過すると自動的に電源がオフになります。
(オートオフタイマー機能)

連続で使用される場合はオートオフタイマー後
ACアダプターをつないだまま(電源オフ状態)で
3分間休ませて本体を冷やしてください。

※ACアダプターをつないだままにすることでファンが回転し
本体内部を素早く冷まします。

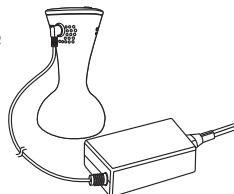

本体内部が高温になると故障の原因になりますので、
長く安心してご愛用いただくためにオートオフタイマー後は
本体を冷やす時間を設けることをお薦めいたします。

使いかた

使いかた


腹部の施術

1 施術を行う部分にジェルを塗布してください。

2 施術の方法

※初めて使用の場合は、全てレベル「1」からご使用ください。

片方の手で本体を持ち、お肉の多い箇所にヘッドをあてます。
そのときヘッドをあてる先にもう片方の手を添えます。
お肉の上を上下に、又は左右に滑らせます。このとき骨は避けてください。
1秒間に2~5cmを目安に、押しつけるように動かしてください。

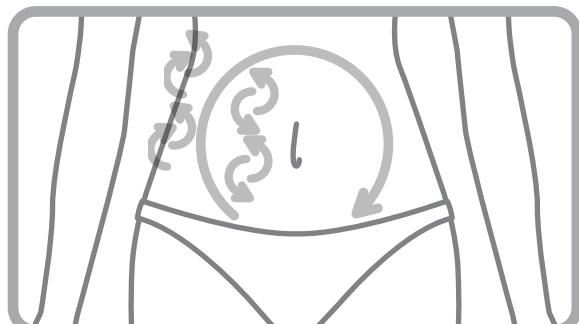

※RF・CAVを使用する際は、一ヶ所にとめず、必ずお肌の上を動かしながら使
用してください。

施術時間の目安

10分~20分

※施術時間が長くなり過ぎないようにご注意ください。


臀部・大腿部の施術

1 施術を行う部分にジェルを塗布してください。

2 施術の方法

※初めて使用の場合は、全てレベル「1」からご使用ください。

片方の手で本体を持ち、お肉の多い箇所にヘッドをあてます。
そのときヘッドをあてる先にもう片方の手を添えます。
お肉の上を上下に、又は左右に滑らせます。このとき骨は避けてください。
1秒間に2~5cmを目安に、押しつけるように動かしてください。

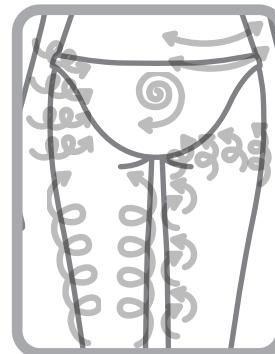

※RF・CAVを使用する際は、一ヶ所にとめず、必ずお肌の上を動かしながら使
用してください。

施術時間の目安

臀部 10分・大腿部 片側 5分

※施術時間が長くなり過ぎないようにご注意ください。


ふくらはぎの施術

1 施術を行う部分にジェルを塗布してください。

2 施術の方法

※初めて使用の場合は、全てレベル「1」からご使用ください。

片方の手で本体を持ち、ふくらはぎにヘッドをあてます。
そのときヘッドをあてる先にもう片方の手を添えます。
お肉の上を上下に、又は左右に滑らせます。このとき骨は避けてください。
1秒間に2~5cmを目安に、押しつけるように動かしてください。

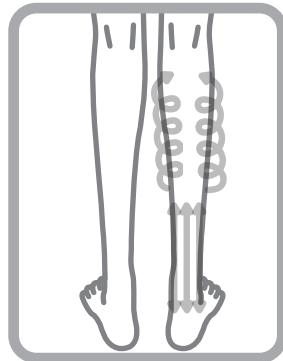

※RF・CAVを使用する際は、一ヶ所にとめず、必ずお肌の上を動かしながら使用してください。

施術時間の目安

ふくらはぎ 片側5分

※施術時間が長くなり過ぎないようにご注意ください。


上腕部・背中の施術

1 施術を行う部分にジェルを塗布してください。

2 施術の方法

※初めて使用の場合は、全てレベル「1」からご使用ください。

片方の手で本体を持ち、お肉の多い箇所にヘッドをあてます。
そのときヘッドをあてる先にもう片方の手を添えます。
お肉の上を上下に、又は左右に滑らせます。このとき骨は避けてください。
1秒間に2~5cmを目安に、押しつけるように動かしてください。

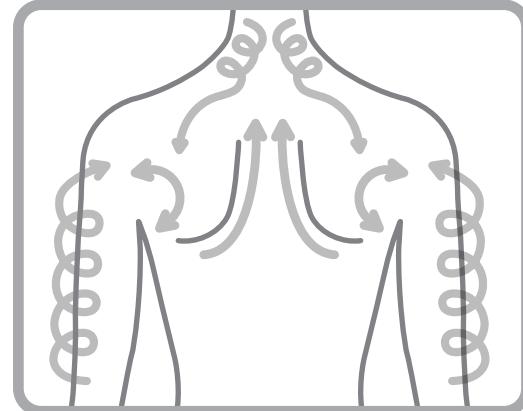

※RF・CAVを使用する際は、一ヶ所にとめず、必ずお肌の上を動かしながら使用してください。

施術時間の目安

背中 10分・片腕 5分

※施術時間が長くなり過ぎないようにご注意ください。

使い終わったら

お手入れのしかた


使用後は毎回必ずお手入れしてください。

製品の故障・動作不良を防ぐために、定期的にお手入れしてください。

お手入れする際は必ず電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いてください。

●本体のお手入れ

- 1 ヘッド面についていた化粧水、ジェルなどを拭き取る。
- 2 水で湿らせて固くしぼった布で、表面の汚れを拭き取る。
 - ・水やぬるま湯を含ませて固くしぼった布で、本体の汚れを拭き取った後、乾拭きしてください。
 - ・汚れがひどい場合は、うすめた中性洗剤を含ませたスポンジや布で拭き取ってください。
 - ・アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。
- 3 アダプタープラグ差入口についていた水滴や汚れを拭き取る。
- 4 通気口にたまつたホコリを取り除く。

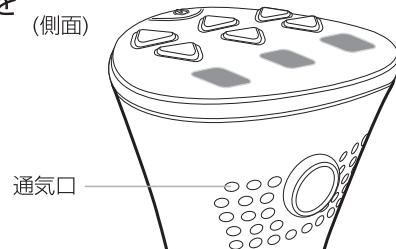

●ACアダプターのお手入れ

アダプターのプラグやケーブルに付着した化粧品、ジェルなどを、使用後に必ず拭き取ってください。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは、本体・ACアダプターのお手入れをしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターを本体と壁面コンセントから抜いて保管してください。
- ストーブやヒーターのそば、浴室など高温多湿の場所、直射日光のある場所、不安定な場所での保管は避けてください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。

保守・点検について

- 長期間使用しなかった本製品を再び使用するときは、使用する前に必ず本製品が正常かつ安全に動作することを確認してから使用してください。
- 本製品の動作に不具合が生じた場合は、修理を依頼される前に「困ったときは」(P.19～P.20)を参照して、症状についてご確認ください。それでも解決しない場合は、お買い上げの販売店、または購入明細をご用意のうえ下記ヤーマンコールセンターまでご相談ください。
- 本製品が故障、損傷した場合はお買い上げいただいた販売店までご相談ください。

お問い合わせ先

ヤーマンコールセンター

受付 9:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)

固定電話など
0120-776-282(通話料無料)
携帯電話・PHS
0570-550-637(通話料有料)

※修理をご依頼される場合は、お買い上げ日が記入されている保証書または購入明細をご用意ください。
※月曜日はお電話が混みあいます。お急ぎでない場合は、火～金曜日の午後2時以降ですとお電話がつながりやすくなっています。

こんなときには

困ったときは

本製品をご使用中に異常や、以下の症状がみられる場合は、原因と処置方法をご確認ください。

こんな症状

考えられる原因

処置方法

電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> → 電源ボタンを長押ししていない → ACアダプターが本体に差し込まれていない 	<ul style="list-style-type: none"> → 電源ボタンを長押し(約3秒)して電源をオンしてください → アダプタープラグをしっかりと奥まで差し込んでください
電源が切れる	<ul style="list-style-type: none"> → オートオフタイマーが働いた(P.9参照) 	
RFがない(感じない)	<ul style="list-style-type: none"> → 使用したい部位をぬらしていない お肌が乾燥している → レベルが低い → 動かす速さが速い → ヘッド面が垂直にお肌にあたっていない 	<ul style="list-style-type: none"> → 化粧品でたっぷりとぬらしてください(化粧品の種類によってはRFを感じにくい場合もあります) → RFのレベルアップボタンを押してレベルを上げてください → 動かす速さの目安: 1秒間に約2~5cm → ヘッド面がお肌に対して垂直にあたるようにしてください(P.11参照)
RFが熱い	<ul style="list-style-type: none"> → 1箇所にあて続けている/ 動かす速さが遅い → ヘッド面がお肌にしっかりとあたっていない 	<ul style="list-style-type: none"> → 動かす速さの目安: 1秒間に約2~5cm → ヘッド面がお肌に対して垂直にあたるようにしてください(P.11参照)

こんな症状

考えられる原因

処置方法

RFが熱い	<ul style="list-style-type: none"> → レベルが高い 	<ul style="list-style-type: none"> → RFのレベルダウンボタンを押してレベルを下げてください
中央ヘッドが熱い	<ul style="list-style-type: none"> → CAVの振動によりヘッドが温まつた 	<ul style="list-style-type: none"> → 熱すぎる場合は使用を中止し10分程度経ってから電源をオンしてください
CAVがない(感じない)	<ul style="list-style-type: none"> → 微小な振動のためほとんど体感がありません 	
CAV使用時に音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> → 振動している音です 問題ありません 	
EMSがない(感じない)	<ul style="list-style-type: none"> → 使用したい部位をぬらしていない → EMSが低い → 感じにくい部位にあてている 	<ul style="list-style-type: none"> → 化粧品でたっぷりとぬらしてください → EMSのレベルアップボタンを押してレベルを上げてください → あてる部位を変えてください
EMSが痛い	<ul style="list-style-type: none"> → ヘッド面が肌にしっかりとあたっていない → レベルが高い 	<ul style="list-style-type: none"> → ヘッド面がお肌に垂直にあたるようにしてください(P.11参照) → EMSのレベルダウンボタンを押してレベルを下げてください
本体から「ブーン」という音がする	<ul style="list-style-type: none"> → ファンの動作音です で、異常・故障ではありません 	
本体が熱い	<ul style="list-style-type: none"> → 連続使用により本体内部が高温になった 	<ul style="list-style-type: none"> → ACアダプターをつなぎだまま(電源オフ状態)で3分間休ませて本体を冷やしてください

こんなときには

こんなときには

アフターサービス

●廃棄について

本製品を廃棄される場合は、自治体により回収方法が異なりますのでご確認のうえ、処分願います。

●製品仕様

定 格	DC12V 5.0A
消 費 電 力	最大約30W
外 形 尺 法	約190×110×110 (mm)
製 品 質 量	約510g
製 造 国	日本
材 質	本体:PET樹脂、ポリカーボネート (ヘッド部:PET樹脂、ステンレス)
セ ッ ト 内 容	本体……1台 ACアダプター……1個 スタンド……1個 メソスタイルゲル プレミア 500g ……1個

●保証について

- 通常のご使用において故障が発生した場合は、お買い上げ日から1年間保証いたします。(消耗品、付属品は除く)
また、保証期間を過ぎたものは送料をご負担いただきます。
- 保証期間を過ぎた後の故障については、実費で修理させていただきます。
- 保証期間中でも有料修理となる場合がありますので、無料修理規定の説明をよくお読みください。
- 万一、故障が生じた場合は、お買い上げの販売店またはヤーマンコールセンターにご相談ください。

付属化粧品 メソスタイルゲル プレミア

肌引き締め美容成分を贅沢に配合した業務用ゲル
キャビテーション・RF・EMSに使用可能なので塗り替えなしでコスト削減・時間短縮
商 品 名：メソスタイルゲル プレミア
内 容 量：500g
品 番：CS18004
単品価格：6,930円(税込)

商品詳細・お買い求めはヤーマンプロフェッショナル公式サイト
よりお問い合わせください。
WEBサイト <https://www.ya-man.com/biz/professional/>
※予告なく単品価格の変更、商品の販売を終了する場合があります。

